

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ: **AC-100**

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αντλία

Οι λειτουργίες της αντλίας περιγράφονται παρακάτω.

- ✚ Διακόπτης Ενεργοποίησης (1)
 - Ο διακόπτης βρίσκεται στο δεξιό μέρος της αντλίας.
 - Η Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας πραγματοποιείται πιέζοντας τον διακόπτη στην θέση ON/OFF αντίστοιχα.

- ✚ Ρυθμιστής Πίεσης (2)
 - Γυρίστε τον ρυθμιστή πίεσης για να καθορίσετε το επιθυμητό επίπεδο πίεσης.

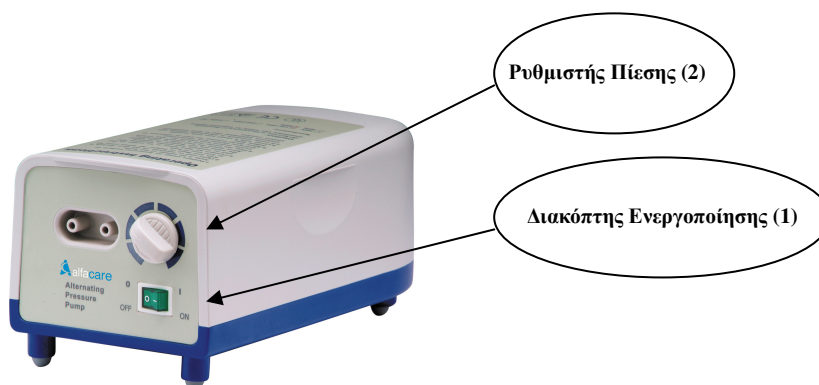

Στρώμα

Το σετ περιέχει στρώμα κυψελών από PVC – EN71

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ✚ Τοποθετείστε την αντλία σε οριζόντια θέση ή κρεμάστε την στο κρεβάτι από τους γάντζους που βρίσκονται στην αντλία.
- ✚ Ελέγξτε για τυχόν αιχμηρά αντικείμενα ή προεξοχές πριν από την τοποθέτηση του αεροστρώματος στο κρεβάτι.
- ✚ Τοποθετείστε το στρώμα στο κρεβάτι και ασφαλίστε το διπλώνοντας τα άνω και κάτω προεξέχοντα πτερύγια κάτω από το στρώμα του κρεβατιού.
- ✚ Συνδέστε τους σωλήνες τροφοδοσίας αέρος με τις εξόδους αέρα της αντλίας. Σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες δεν έχουν διπλωθεί ή παραμορφωθεί.
- ✚ Τοποθετείστε την ηλεκτρική αντλία σε κατάλληλη παροχή ρεύματος και ενεργοποιείτε την συσκευή. Το φωτάκι λειτουργίας θα πρέπει τώρα να είναι αναμμένο.
- ✚ Απαιτούνται περίπου 20 λεπτά για να φουσκώσει πλήρως το στρώμα.
- ✚ Σκεπάστε το στρώμα με ένα σεντόνι και εφαρμόστε χαλαρά.
- ✚ Ρυθμίστε τον έλεγχο πίεσης για να προσφέρετε το καλύτερο αποτέλεσμα για τον ασθενή πάντα με τις οδηγίες του ειδικού ιατρού.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

- ✚ Το στρώμα μπορεί να καθαριστεί με απολυμαντικό διάλυμα
- ✚ Μην βυθίζετε την αντλία σε νερό
- ✚ Αποφεύγετε γενικά τις υψηλές θερμοκρασίες (πχ κλιβάνους)
- ✚ Μετά τον καθαρισμό το στρώμα και το κάλυμμα να αεριστούν μέχρι να στεγνώσουν πλήρως

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τάση :** 220V/50Hz
- **Παροχή αέρα:** 5 liter/min.
- **Όρια Πίεσης:** 40 mmHg – 100 mmHg
- **Χρόνος Κύκλου:** 10 min.
- **Βάρος:** 1,4 kg
- **Διαστάσεις Αντλίας:** 26cm(M) x 12cm(Π) x 11.5cm(Y)
- **Διαστάσεις Στρώματος :** 200cm(M) x 90cm(Π) x 6.5cm(Y)
- **Υλικό κατασκευής Στρώματος :** PVC – EN71

ΕΓΓΥΗΣΗ: 2 έτη