



- Βοηθήματα Ασθενών
- Ιατροτεχνολογικά Είδη
- Ορθοπεδικά

www.alfacare.gr
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
2610 323235

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΛΙΝΗΣ



Το προϊόν διαθέτει πιστοποιητικό **CE**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΟΦ : I 787 04 2016

ΜΕΡΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

- **ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
 1. ΣΩΜΙΕ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ
 2. ΜΕΤΩΠΕΣ ΧΡΩΜΙΟΥ
 3. ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΕΣ ΦΟΡΜΑΪΚΕΣ
 4. ΠΛΑΪΝΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ
 5. ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΩΜΙΕ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

- **ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**
 1. ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΦΡΕΝΟ
 2. ΠΛΑΙΝΟ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ
 3. ΑΝΑΡΤΗΡΑΣ ΕΛΞΗΣ
 4. ΣΤΡΩΜΑ ΑΦΡΟΛΕΞ

Διαστάσεις Κλίνης	90 X 203 cm
Απόσταση απο το έδαφος	50 cm
Μέγιστο Βάρος Ασθενούς	140 kg

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ

Τοποθετούμε τις γωνίες του σωμιέ στις ειδικές υποδοχές που υπάρχουν στις μετώπες και έπειτα εφαρμόζουμε τις βίδες.

Στην συνέχεια τοποθετούμε τα στηρίγματα για το στρώμα στις στρογγυλές υποδοχές που υπάρχουν εσωτερικά του σωμιέ. (τοποθετούνται προαιρετικά και για καλύτερη στήριξη του στρώματος)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μεγάλα στηρίγματα του στρώματος τοποθετούνται στο πάνω μέρος του σωμιέ (στο ερεισίνωτο πλάτης)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΝΙΒΕΛΑΣ

Για την ανύψωση του κορμού του ασθενούς γυρίζουμε την μανιβέλα δεξιόστροφα.

Στα μοντέλα με δύο μανιβέλες για την ανύψωση κορμού και ποδιών, γυρίζουμε τις μανιβέλες πάλι δεξιόστροφα (ταυτόχρονα ή μεμονομένα)

Η κλίνη διατίθεται στα παρακάτω μοντέλα

1. Κλίνη Νοσοκομειακή με 1 μανιβέλα
2. Κλίνη Νοσοκομειακή με 1 μανιβέλα και ρόδες
3. Κλίνη Νοσοκομειακή με 2 μανιβέλες
4. Κλίνη Νοσοκομειακή με 2 μανιβέλες και ρόδες

ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της νοσοκομειακής κλίνης για χρονικό διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς και service και ανταλλακτικά για 10 έτη.
2. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής και περιλαμβάνει τόσο τα υλικά όσο και την εργασία επισκευής
3. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, η εταιρεία θα επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή θα αντικαταστήσει ολόκληρη την ελαττωματική συσκευή σύμφωνα πάντα με την κρίση του τεχνικού της.
4. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη αγοράς της συσκευής όπου και θα αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς.
5. Η διάρκεια της εγγύησης (3 έτη) παρατείνεται ύστερα και μόνον από την σύμφωνη γνώμη της εταιρείας.
6. Τα έξοδα μεταφοράς της κλίνης προς και από το συνεργείο βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.
7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ:

1. Συσκευές που επισκευάστηκαν από τον αγοραστή ή άλλα μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
2. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως μανιβέλα, ρόδες κλπ.
3. Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.
4. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
5. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά στο συνεργείο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ :

ΕΠΩΝΥΜΟ :

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

ΠΟΛΗ :

S/N :

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

...../...../.....