

ΕΙ: οδηγίες χρήσης, διαβάστε προσεκτικά

HEMAGEL

PROCTO

ΥΠΟΘΕΤΑ

HEMAGEL®

Από την VH Pharma a.s.

ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΠΟΥΛΩΣΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

Το **Hemagel® Procto** προσφέρει μια μοναδική λύση για την επούλωση οξέων και χρόνιων τραυμάτων στην πρωκτική περιοχή και ιδίως σε ασθενείς με πρωκτικές ραγάδες και αιμορροΐδες.

ΣΥΝΘΕΣΗ:

Το **Hemagel® Procto** είναι ένα λευκό υπόθετο που περιέχει το συμπολυμερές Hema σε σκόνη και βάση Whitesol W 25.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΗΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΘΕΤΟ:

- Τα υπόθετα χορηγούνται εντός του ορθού, κατά προτίμηση μετά την αφόδευση και το πλύσιμο, με το στρογγυλεμένο άκρο πρώτα.
- Κόψτε 1 υπόθετο από τη λωρίδα κατά μήκος της διάτρησης, ανοίξτε απαλά, ξετυλίξτε το περιτύλιγμα και αφαιρέστε το υπόθετο.
- Εισάγετε το υπόθετο με το στρογγυλεμένο άκρο πρώτα, βαθιά μέσα στον πρωκτό, κατά προτίμηση σε ελαφριά κεκλιμένη θέση.
- Σε περίπτωση που δε συστήνεται διαφορετικά, τα υπόθετα **Hemagel® Procto** χορηγούνται μία φορά ημερησίως, κατά προτίμηση πριν την κατάκλιση.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες σχετικά με τη χρήση του **Hemagel Procto**. Ελαφρύς ερεθισμός του ορθού σε υπερευαίσθητα άτομα, όπως μικρή φαγούρα ή κάψιμο είναι φυσιολογικός. Η χρήση του υπόθετου ενδέχεται να προκαλέσει καθαρτικά συμπτώματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν παρουσιαστούν τυχόν αρνητικές παρενέργειες διακόψτε αμέσως τη θεραπεία και επικοινωνήστε με τον θεράποντα ιατρό σας. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά! Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Η χρήση σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης ισχύει έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που αναγράφεται.

Λόγω της δομής των μακρομορίων του, το **Hemagel® Procto** δεν εισέρχεται στον οργανισμό. Τα υπόθετα μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν από όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας σε κάθε περίπτωση.

Οι παθήσεις του ορθού απαιτούν ειδική υγιεινή και τακτική κινητικότητα του εντέρου. Ως εκ τούτου, καταναλώνετε τις σωστές ποσότητες υγρών, ακολουθείτε μια διατροφική χαμηλή σε μπαχαρικά και αυξήστε την πρόσληψη φυτικών ινών.

Εάν τα προβλήματα δεν υποχωρούν ή ακόμη και αν επιδεινωθούν μέσα σε 7 ημέρες, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποθηκεύστε σε θερμοκρασία 15-25 °C, στην αρχική τους συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Η συσκευασία περιέχει 5 υπόθετα σε κάψουλες PVC / PE.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ALFACARE ΑΕ, Καλαβρύτων 46, Πάτρα
www.alfacare.gr / www.hemagel.gr

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Prague 1, Czech Republic

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 29. 6. 2017

GR: οδηγίες χρήσης, διαβάστε προσεκτικά

Υδροφιλή γέλη

HemaGel

HemaGel®
Από την VH Pharma a.s.
Ταχύτερη επούλωση τραυμάτων.
Αποστειρωμένο προϊόν.

Πώς να επουλώσετε μια πληγή γρήγορα και εύκολα.



1023



Η **HemaGel®** είναι μια ιατρική συσκευή κατηγορίας IIb που προσφέρει μια μοναδική λύση για τη θεραπεία οξέων τραυμάτων, όπως κοψίματα, εκδορές, εγκαυμάτα πρώτου βαθμού, μικροτραυματισμούς στο στήσι ή κατά τη διάρκεια αθλημάτων ή παιχνιδιών και χρόνιων τραυμάτων, όπως φλεβικά έλκη που προκαλούνται από διαταραχές του φλεβικού ή αρτηριακού συστήματος, χρόνιες πληγές σε ασθενείς με διαβήτη, κατάκλιση, μετεγχειρητικές πληγές και άλλες δερματικές βλάβες. Οι εξαιρετικές ιδιότητες της **HemaGel®** ενισχύονται από το υγρό περιβάλλον της πληγής κατά τη διάρκεια της επούλωσης. Η σταθερή υγρασία στο τραύμα εμποδίζει το σχηματισμό εσχάρων, επιταχύνοντας έτσι τη διαδικασία επούλωσης.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΓΕΛΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ;

Έχει αποδειχθεί σε κλινικές μελέτες ότι λόγω των ιδιοτήτων της η **HemaGel®**:

- Δεσμεύει χημικά τις ελεύθερες ρίζες οξυγόνου που παράγονται κατά τη διάρκεια φλεγμονωδών διεργασιών
- Υποστηρίζει το βέλτιστο pH στο τραύμα, συμβάλλοντας έτσι στη διαδικασία επούλωσης
- Η αποδεδειγμένη δομή της γέλης αποτρέπει την απελευθέρωση σωματιδίων της στο τραύμα και επακόλουθο ερεθισμό (δεν προσκολλάται)
- Παρέχει υγρασία στο τραύμα
- Αποτρέπει το τραύμα του τραύματος και τη δημιουργία εσχάρων
- Λόγω της ικανότητας απορρόφησης, βοηθά στον καθαρισμό της πληγής
- Μειώνει τον πόνο στην πληγή
- Αποτρέπει την υπερβολική δημιουργία ουλών, εφόσον εφαρμοστεί νωρίς

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ HEMAGEL:

Η **HemaGel®** είναι μια υδροφιλή μεθακρυλική γέλη με βάση το διασταυρωμένο συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-υδροξυαιθυλεστέρα με πολυμερικά δεσμευμένες και στερεοχημικά παρεμοδιωμένες αμινομάδες και αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μακρομοριακής Χημείας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΓΕΛΗ:

- Καθαρίστε την πληγή από μηχανικές προσμείξεις, όπως σωματίδια σκόνης και υπολείμματα προηγούμενων θεραπευτικών υλικών που θα μπορούσαν να ερεθίσουν και να βλάψουν την πληγή.
- Ανοίξτε το συλλητήριο γυρίζοντας το καπάκι και βεβαιώστε το επί της κεφαλής του συλλητηρίου.
- Απλώστε ένα λεπτό στρώμα γέλης (περίπου 1 mm) σε ολόκληρη την περιοχή της βάσης του τραύματος και αφήστε μια μικρή επικάλυψη σε υγιές δέρμα. Η γέλη προσκολλάται στην επιφάνεια του τραύματος και απορροφά διαδοχικά εκκρίσεις και άλλα υγρά.
- Καλύψτε το τραύμα με ένα μη απορροφητικό υλικό (για παράδειγμα αποστειρωμένη γάζα) και έπειτα σταθεροποιήστε με έναν επίδεσμο ή λευκόπαστε. Οι μικροτραυματισμοί μετά την εφαρμογή της γέλης πρέπει να καλύπτονται με αυτοκόλλητο επίδεσμο. Τα υλικά σταθεροποίησης πρέπει να υπερκαλύπτουν κατά περίπου 1 cm τις παρυφές του τραύματος.
- Ασθενείς με ένδειξη για θεραπεία συμπίεσης πρέπει να συμπληρώσουν τη θεραπεία με ελαστικό επίδεσμο, σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού.
- Η επίδραση της γέλης εμφανίζεται με μορφή οίδηματός. Η μοναδική τεχνολογία της γέλης αποτρέπει την προσκόλληση στο τραύμα και επιτρέπει την εύκολη και άνετη πόνο απομάκρυνσή της με ένα απλό καθαρίσμο.
- Αλλαγή της περιόδου, ανάλογα με τις ανάγκες, μετά από 12 έως 48 ώρες. Εξετάστε την κατάσταση του τραύματος και τη διαρροή του δευτερογενούς καλύμματος ή ακολουθήστε τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Για χρόνιες πληγές, μπορεί να μεσολαβήσει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έως 72 ωρών μεταξύ των αλλαγών περιέδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Υποτιμημένη εμπειρία και κλινικές έρευνες έδειξαν ότι ένα υγρό περιβάλλον επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία επούλωσης, υποστηρίζει το διαχωρισμό των κυττάρων και τη μετακίνησή τους στην πληγή. Ταυτόχρονα διατηρεί σταθερή θερμοκρασία στο τραύμα, η οποία είναι πολύ σημαντική για τη σωστή επούλωση. Κατά τη θεραπεία περιπλοκών και μολυσμένων πληγών, είναι απαραίτητο να τηρούνται και άλλες προϋποθέσεις για την επούλωση όπως επαρκής θρέψη, καθαριότητα τραύματος, θεραπεία δευτερογενών ασθενειών και τήρηση των οδηγιών του ιατρού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:

Δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες, όπως αλλεργίες, αυξημένος πόνος κ.λπ., ή άλλες αντενδείξεις για τη **HemaGel®**.
Ήπιος ερεθισμός του δέρματος σε άτομα με αυξημένη ευαισθησία, όπως ελαφρύς κνησμός, δεν αποτελεί ανεπιθύμητη ενέργεια.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Εάν εμφανιστούν ανεπιθύμητες ενέργειες (όπως αυξημένος πόνος, ερυθρότητα κλπ.), διακόψτε τη θεραπεία και επικοινωνήστε με τον ιατρό σας. Κράτση της μεκρία από παιδιά! Να μην γίνεται κατάποση! Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο συλλητήριο. Όταν χρησιμοποιείτε τη **HemaGel®** για τη θεραπεία των θηλών σε θηλάζουσες μητέρες, απομακρύνετε καλά τη **HemaGel®** από τις θηλές πριν θηλάσετε.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Φυλάσσεται σε ξηρό μέρος θερμοκρασίας 15-25 ° C.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Συλλητήριο 5g, 30g, 100 g.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:

ALFACARE AE,
Καλαβρύτων 46, Πάτρα
www.hemagel.gr / www.alfacare.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

VH Pharma a.s., Jakubská 647/2, 110 00 Praha 1, Τσεχική Δημοκρατία.

Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: 15 Μαΐου 2017