

VISIONAIRE 5

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Φροντίζετε πάντα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής **διαβάζοντας** προσεκτικά τις **οδηγίες χρήσεως**.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται, να φυλάσσεται και να μεταφέρεται, κατά προτίμηση, σε **κάθετη** θέση.
- **Μην εκτίθεται** η συσκευή σε πυρακτωμένες εστίες και **πηγές θερμότητας** (π.χ. γυμνή φλόγα, καλοριφέρ ή τσιγάρο).
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε **χώρο με εξαερισμό**, χωρίς καπνούς, σκόνη και ατμοσφαιρική ρύπανση.
- Βεβαιωθείτε ότι οι **ηλεκτρικές προδιαγραφές** της κεντρικής παροχής ρεύματος ταιριάζουν με αυτές που αναγράφονται την ετικέτα του κατασκευαστή.
- Αφήνετε τουλάχιστον **30 εκατοστά ελεύθερο χώρο** περιμετρικά της συσκευής για το καλύτερο αερισμό της.
- Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή κοντά σε συσκευές με ιδιαίτερες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.
- Σε περίπτωση **ηχητικής ειδοποίησης** για βλάβη συμβουλευτείτε την ενότητα **(IV. 10. Αντιμετώπιση προβλημάτων)** του εγχειρίδιου χρήσης. Σε περίπτωση μη αντιμετώπισης της βλάβης ειδοποιείτε τον **αρμόδιο προμηθευτή** της συσκευής σας.
- **Μην αποσυναρμολογείτε** τη συσκευή ή επιχειρήσετε **οποιαδήποτε επισκευή** παρά μόνο από **εξουσιοδοτημένο τεχνικό**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ)

- Όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία τότε παράγεται ένας ήχος δοκιμαστικής λειτουργίας που διαρκεί περίπου 5 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση μη χρήσης της μονάδας για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αρκετά λεπτά προτού ενεργοποιηθεί ο αρχικός αυτός συναγερμός.
- Στην αρχή της λειτουργίας της συσκευής θα ανάψει η πορτοκαλί ένδειξη O₂ όπου θα σβήσει μετά από 5 λεπτά ως ένδειξη μέγιστης περιεκτικότητας οξυγόνου.
- Καθαρισμός του εξοπλισμού οξυγονοθεραπείας (**ρινικοί σωλήνες & υγραντήρες**) 3 φορές την εβδομάδα και αντικατάσταση τους όταν έχουν υποστεί φθορές μετά από πολύ χρήση.
- Συμπλήρωμα του υγραντήρα με **απιονισμένο** νερό όταν η στάθμη στον υγραντήρα φτάσει στην ένδειξη **min**. Προσοχή συμπληρώνουμε **0.5** εκατοστά **κάτω** από την

ένδειξη **max** του υγραντήρα για την αποφυγή δημιουργίας σταγονιδίων στο ρινικό σωλήνα.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συνδεθεί σωστά και επίσης έχει σφραγιστεί σωστά το καπάκι του υγραντήρα για την αποφυγή διαρροής.
- Ξέπλυμα του υγραντήρα με ξύδι 1-2 φορές ώστε να αποφευχθεί ο φραγμός του από άλατα.
- **Καθαρισμός** της συσκευής μόνο με ένα στεγνό πανί ή, αν απαιτείται, με ένα **νωπό σφουγγάρι και καθαρό νερό ή σαπουνόνερο μόνο** και έπειτα να στεγνώνεται καλά.
- Ελέγχετε κάθε φορά που χρησιμοποιείται η συσκευή ότι η ροή του οξυγόνου αναταράσσει την επιφάνεια του νερού στον υγραντήρα.
- Έλεγχος λειτουργίας του ροόμετρου με τη μπίλια να χωρίζεται στη μέση για τη σωστή ένδειξη ροής.
- Όταν **δε χρησιμοποιούμε** τη συσκευή φροντίζουμε να κλείνουμε το ροόμετρο τελείως για να σφραγιστεί το κύκλωμα πίεσης της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

- Περιοδικός έλεγχος της περιεκτικότητας του οξυγόνου κάθε συμπτυκνωτή κάθε 3 μήνες για την αποφυγή μεγαλύτερων βλαβών.
- **Συνίσταται ενεργοποίηση της συσκευής για το χρονικό διάστημα των 30 λεπτών κάθε μήνα σε περίοδο έντονης στασιμότητας.**
- Υποχρεωτικός έλεγχος ρουτίνας της συσκευής μια φορά το χρόνο από το εξουσιοδοτημένο τεχνικό τμήμα της Alfacare.
- Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη συντήρηση σε περίπτωση σωστής και κανονικής χρήσης της συσκευής για το λόγο ότι διαθέτει ηχητικές ενδείξεις βλαβών όπου εντοπίζουν την αιτία βλάβης σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
- Όταν δε χρησιμοποιείται η συσκευή, τότε φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου και συνίσταται το κλείσιμο του ροόμετρου για την προστασία του κυκλώματος πίεσης της συσκευής.
- **Φυλάσσεται** την εργοστασιακή συσκευασία του συμπτυκνωτή οξυγόνου για την ασφαλέστερη μεταφορά του.