



## Οδηγός Εκτύπωσης Δεδομένων για Συσκευές BMC - Resmart

Βήμα 1: Τοποθετήστε την κάρτα στην υποδοχή SD του υπολογιστή σας, και ανοίξτε το λογισμικό RESMART. Πατήστε το κουμπί OPEN όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

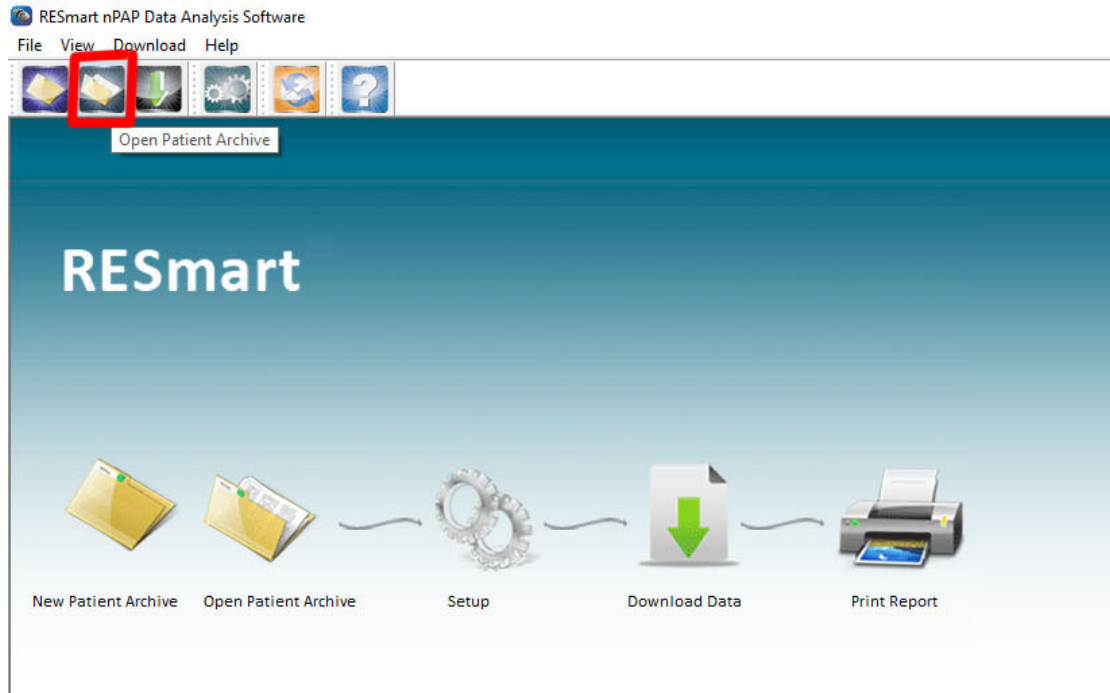


Βήμα 2: Εντοπίζετε την κάρτα στο παράθυρο που ανοίγει, επιλέγετε το αρχείο που καταλήγει σε .USR, και το ανοίγετε.

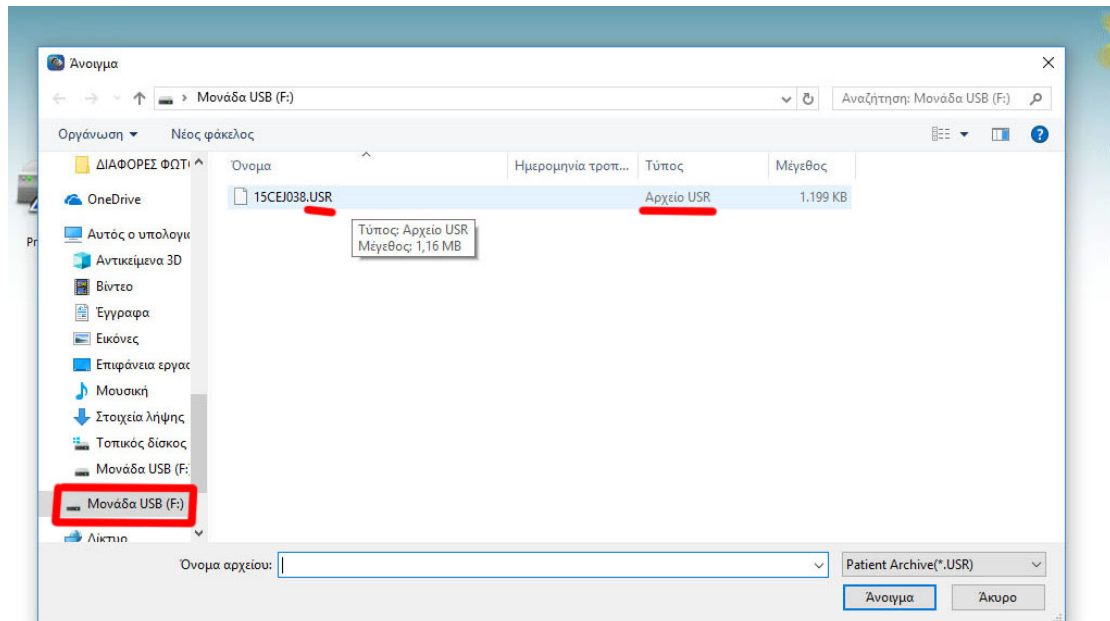




Βήμα 5: Στο κεντρικό μενού, επιλέγετε, FILE > PRINT REPORT και εκτυπώνετε τις πρώτες σελίδες της αναφοράς.

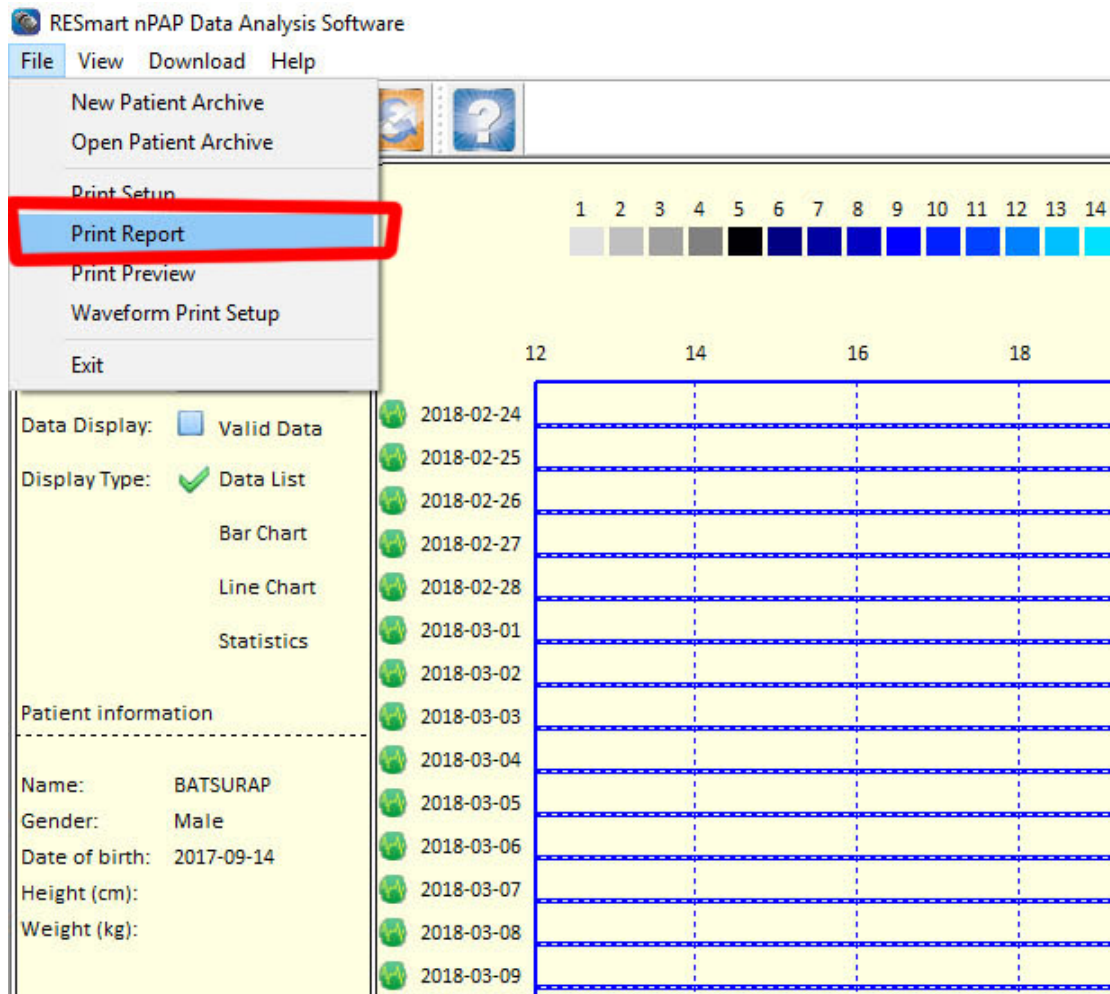

Βήμα 6: Για να εκτυπώσετε τα διαγράμματα, επιλέξτε από το μενού την επιλογή BAR CHART και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία. Επαναλάβετε για το LINE CHART και για τα STATISTICS

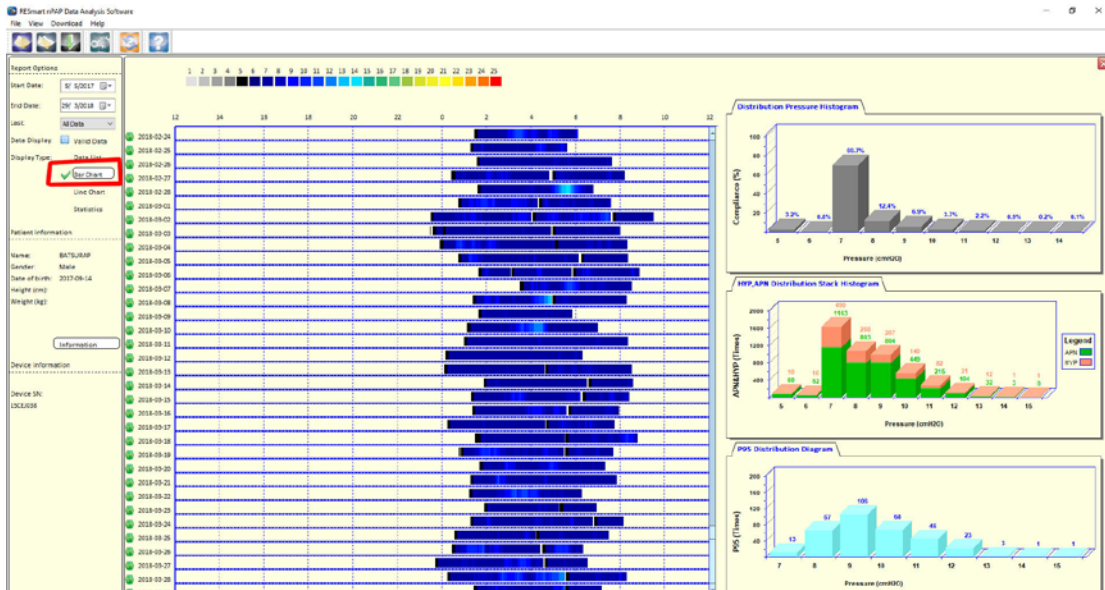

### RESmart nPAP Data Analysis Software

File View Download Help

Report Options

Start Date: 5/ 5/2017

End Date: 29/ 3/2018

Last: All Data

Data Display:  Valid Data

Display Type: Data List

Bar Chart


Line Chart

Statistics

Patient information



Βήμα 7: Για να εκτυπώσετε τα ημερήσια REPORTS, κάνετε διπλό κλικ στην επιθυμητή ημερομηνία και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία.

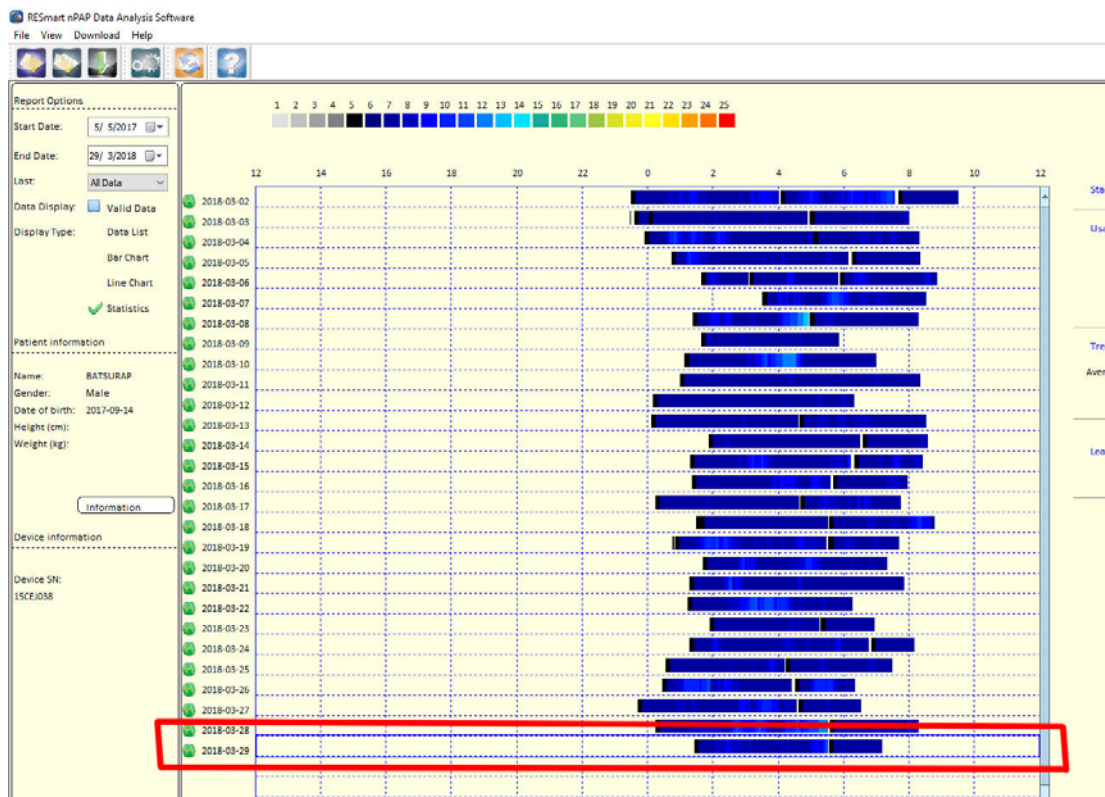

Βήμα 8: Το πόσα ημερήσια reports θα εκτυπώσετε εξαρτάται από εσάς, καλό θα είναι να υπάρχουν οι 5-10 τελευταίες ημέρες

