





Flexy-heat
healthcare

BS-100
Ζυγαριά Μπάνιου



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

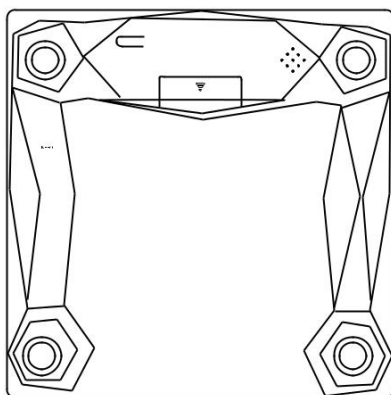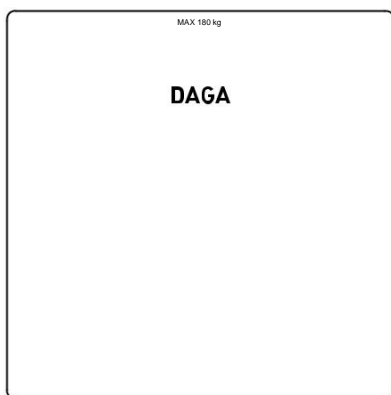

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το προϊόν εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.
- Μη μετακινείτε τη συσκευή ενώ χρησιμοποιείται.
- Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος ζύγισης της συσκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα πόδια σας είναι βρεγμένα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το γυαλί είναι ραγισμένο ή σπασμένο.
- Η λανθασμένη χρήση του προϊόντος μπορεί να είναι επικίνδυνη, καθιστώντας την εγγύηση και την ευθύνη του κατασκευαστή άκυρη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΧΡΗΣΗ

Η B&B TRENDS SL αποποιείται κάθε ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε άτομα, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια ζυγαριά της Daga.

Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι άθικτη και δεν έχει καμία ζημιά. Επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν για οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχετε.

Έχετε αποκτήσει τα ακόλουθα με την αγορά σας:

1 ζυγαριά Daga

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ensure Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες ασφαλείας που αναγράφονται στην αρχή αυτού του εγχειριδίου ακολουθούνται συνεχώς κατά την χρήση.

Η ζυγαριά επιτρέπει μέγιστη μέτρηση 180kg και ακρίβεια 50g.

Ακολουθήστε τις οδηγίες πριν την ενεργοποίηση της συσκευής.

1. Βγάλτε το προϊόν από την αρχική του συσκευασία, προσέχοντας να μην προκληθεί βλάβη σε κανένα από τα μέρη του. Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για να βγάλετε το προϊόν από το κουτί.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του ζυγού.
3. Τοποθετήστε τη φορτισμένη μπαταρία στη θέση που υποδεικνύεται κάτω από το κάλυμμα. Υπάρχει μια εικόνα της μπαταρίας που δείχνει πώς πρέπει να τοποθετηθεί με τη σωστή πολικότητα.
4. Κλείστε ξανά το κάλυμμα
5. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια οριζόντια, σταθερή, άκαμπτη, επίπεδη, σταθερή επιφάνεια που δεν υπάρχουν κραδασμοί.
6. Τοποθετήστε απαλά τα πόδια σας στην επιφάνεια της ζυγαριάς για να εκκινήσετε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο "0.0" στην οθόνη.
7. Πατήστε στο κέντρο της πλατφόρμας, αποφεύγοντας τυχόν ξαφνικές κινήσεις, κρατήστε σταθερή θέση και μην αγγίζετε άλλα αντικείμενα, μέχρι να εμφανιστεί το βάρος σας. Ο χρήστης πρέπει να περιμένει μέχρι να υπολογιστεί το βάρος. Η ζυγαριά υποδεικνύει ότι η λειτουργία ζύγισης ολοκληρώνεται αναβοσβήνοντας την τελική τιμή τρεις φορές.
8. Η συσκευή απενεργοποιείται μετά από μερικά δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας
9. Κατεβείτε από τη ζυγαριά και περιμένετε να εμφανιστεί το σύμβολο "0.0" στην οθόνη για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.
10. Επαναφέρετε τη συσκευή σε ασφαλή και σταθερή θέση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Αντενδείξεις

Το προϊόν αυτό προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται από έναν ενήλικα προκειμένου να αποφευχθεί η χρήση της συσκευής ως παιχνιδιού.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη πείρα και γνώσεις, εκτός εάν εποπτεύονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Επισκευές

Μόνο εξειδικευμένο προσωπικό μπορεί να πραγματοποιεί επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές. Οποιαδήποτε λανθασμένη επιδιόρθωση μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικό κίνδυνο για τους χρήστες. Επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για επισκευές. Η μη τήρηση των οδηγιών συνεπάγεται την πλήρη απώλεια της εγγύησης του.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Πιθανά λειτουργικά προβλήματα

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη ή η μπαταρία δεν είναι σωστά τοποθετημένη	Πατήστε στη ζυγαριά και περιμένετε για να εμφανιστεί το βάρος σας ή πιέστε με τα πόδια σας μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "0.0". Ελέγξτε ότι η μπαταρία είναι σωστά τοποθετημένη και με την σωστή πολικότητα
	Η συσκευή έχει βλάβη	Επικοινωνήστε με κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Daga
Μήνυμα "Lo"	Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Μήνυμα λάθους "Err"	Υπερφόρτωση	Έχετε υπερβεί το μέγιστο βάρος μέτρησης

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Αυτό το προϊόν μπορεί να καθαριστεί μόνο με το χέρι, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί που έχει εμποτιστεί σε ήπιο σαπούνι. Για τον καθαρισμό της συσκευής σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση λειαντικών προϊόντων καθαρισμού, λειαντικών βουρτσών, διαλυτών, βενζολίου, διαλυτικού ή αλκοόλης. Μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για να την καθαρίσετε ή να την βρέχετε υπερβολικά. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή προτού στεγνώσει τελείως

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μην απορρίπτετε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο βιολογικής συλλογής που βρίσκεται κοντά στο σπίτι σας και απορρίψτε σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) για να συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ζητήστε από τον διανομέα σας λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες μεθόδους απόρριψης συσκευασιών και απορριμμάτων χρησιμοποιημένων συσκευών.

Ελπίζουμε ότι θα είστε ικανοποιημένοι με αυτό το προϊόν.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, γνωστή ως WEEE (Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού), παρέχει το νομικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διάθεση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν στον κάδο απορριμμάτων, αντίθετα πηγαίστε στο κέντρο συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που βρίσκεται πιο κοντά στο σπίτι σας.



Το προϊόν μπορεί να περιέχει μπαταρίες. Αφαιρέστε τις πριν από την απόρριψη του προϊόντος και απορρίψτε σε ειδικά εγκεκριμένους για το σκοπό αυτό κάδους.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε, καθώς η επιφάνεια του προϊόντος είναι ολισθηρή όταν είναι βρεγμένη

ΕΓΓΥΗΣΗ

Για την επισκευή του προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να μεταβεί σε τεχνική υπηρεσία εξουσιοδοτημένη από την B & B TRENDS, SL. καθώς οποιαδήποτε κακή μεταχείριση από πρόσωπα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την B & B Trends SL, κατάχρηση ή ακατάλληλη χρήση, θα οδηγήσει στην ακύρωση αυτής της εγγύησης. Για την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων αυτής της εγγύησης πρέπει να παραδοθεί δεόντως συμπληρωμένη και συνοδευόμενη από το τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίο παράδοσης. Για να απαιτήσουμε την τήρηση των διατάξεων της εγγύησης 2 ετών από την παράδοση του προϊόντος, ο καταναλωτής οφείλει να ενημερώσει τον πωλητή για την έλλειψη συμμόρφωσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες γίνονται εντός της νόμιμης προθεσμίας της εγγύησης. Αυτή η εγγύηση πρέπει να παραμείνει στον χρήστη, καθώς και το τιμολόγιο, το εισιτήριο αγοράς ή το δελτίο παράδοσης για να διευκολυνθεί η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Για τεχνική εξυπηρέτηση και εξυπηρέτηση μετά την πώληση εκτός του ισπανικού εδάφους, παρακαλούμε να στείλετε την αίτησή σας στο σημείο πώλησης όπου αγοράσατε το προϊόν απευθείας, ή επικοινωνήστε με την B & B TRENDS, SL.

Όνομα _____

Διεύθυνση _____

Πόλη _____

Νομός _____

Τηλέφωνο _____

Προϊόν N/REF: _____

Ημερομηνία Πώλησης

Σφραγίδα Καταστήματος





Flexy-heat healthcare

B&B TRENDS, S.L.
C/Catalunya, 24 P.L Ca N'Oller
08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona) Spain
www.daga.eu