


Εγχειρίδιο χρήσης AC-331

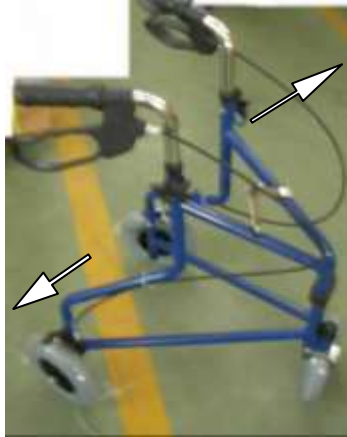

Βήμα 1: Αφαιρέστε τις λαβές και ανοίξτε τον περιπατητήρα. Εισαγάγετε τις λαβές στις δύο υποδοχές του πλαισίου, ρυθμίστε μέχρι να έχουν το ίδιο ύψος. Βιδώστε το πλαίσιο, τοποθετήστε τη ροδέλα και σφίξτε το παξιμάδι.



Βήμα 2: Τοποθετήστε το καλάθι στις υποδοχές του γάτζου



Βήμα 3: Δοκιμάστε τον περιπατητήρα για να ελέγξετε το φρένο, έπειτα είναι έτοιμο για χρήση.

Για να ασφαλίσετε το φρένο, πιέστε το προς τα κάτω.

Ασφάλεια και συντήρηση:

1. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε αν είναι σφιχτά βιδωμένο.
2. Τα περιστρεφόμενα μέρη καλό θα είναι να λιπαίνονται με κατάλληλα λιπαντικά.
3. Να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται τακτικά. Να τοποθετείται σε ξηρό περιβάλλον.