

ΣΤΑΤΩ ΟΡΟΥ AC-552

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μην εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό χωρίς πρώτα να έχετε διαβάσει και κατανοήσει εντελώς το φύλλο οδηγιών. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να καταλάβετε τις προειδοποιήσεις αυτές και τις οδηγίες, επικοινωνήστε με έναν ειδικό υγείας, αντιπρόσωπο ή τεχνικό προσωπικό, εάν είναι αυτό δυνατό, πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τον εξοπλισμό γιατί σε κάθε άλλη περίπτωση είναι δυνατόν να προκληθούν τραυματισμοί ή βλάβες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ελέγχετε πάντα το στατώ ορού για να σιγουρεύετε ότι βρίσκεται στην σωστή θέση και πως είναι σταθερό, πριν την χρήση. Μετά από οποιοσδήποτε ρυθμίσεις, επισκευές ή σέρβις και ΠΡΙΝ το χρησιμοποιήσετε, σιγουρευτείτε ότι όλα τα επισυναπτόμενα εξαρτήματα του και υλικά είναι καλά σφιγμένα-αλλιώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στον ασθενή ή βλάβη στο προϊόν.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΤΩ

1. Εισάγετε το κάτω μέρος του κονταριού στην υποδοχή της βάσης .
 2. Ασφαλίστε τον σωλήνα του στατώ στη βάση με τους δύο δακτύλιους, το περικόχλιο και την βίδα. Σφίξτε καλά.
 3. Τοποθετήστε τα άγγιστρα στο πάνω μέρος του σωλήνα του στατώ. Γυρίστε το δεξιόστροφα για να το σφίξετε.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σιγουρευτείτε ότι το κοντάρι βρίσκεται στο επιθυμητό ύψος.
4. Ύψώστε τον σωλήνα στο επιθυμητό ύψος.
 5. Ασφαλίστε τον σφικτήρα ρύθμισης γυρίζοντας τον δεξιόστροφα στο επιθυμητό πάντα ύψος.