

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ

Τοποθετήστε τη μία πλευρά του τόξου κάτω από το στρώμα και επάνω στην άλλη πλευρά τοποθετήστε τα σκεπάσματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τον ασθενή. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της κλίνης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Συστήνεται καθάρισμα με μαλακό καθαριστικό.

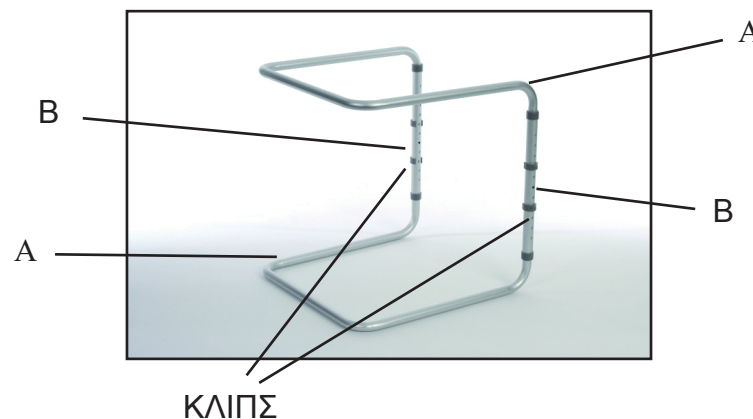
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:

ALFACARE AE
Καλαβρυτων 46, 26335, Πάτρα
www.alfacare.gr



Model Nos: AC-856

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ**

1. Ενώστε τους δύο ευθείους σωλήνες B με τους σωλήνες της βάσης A.
2. Εισάγετε τον σωλήνα A μέσα στον σωλήνα B και έπειτα τοποθετήστε τα ειδικά κλιπς.
3. Επαναλάβετε και από την αντίθετη πλευρά.

Το προϊόν είναι πλέον συναρμολογημένο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ

Για να ρυθμίσετε το ύψος, εισάγετε τον σωλήνα A μέσα στον σωλήνα B και αφαλίστε τα κλιπς στο επιθυμητό ύψος.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΛΙΠΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ