

# G3 BPAP Series Εγχειρίδιο γρήγορης λειτουργίας

## 1. Λειτουργίες κουμπιών



Πλήκτρο αρχικής σελίδας: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στο αρχικό περιβάλλον.




Επιλογέας: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής.



Πλήκτρο Έναρξης / Τερματισμού: Έναρξη / Τερματισμός παροχής αέρα.

## 2. Ρύθμιση της συσκευής

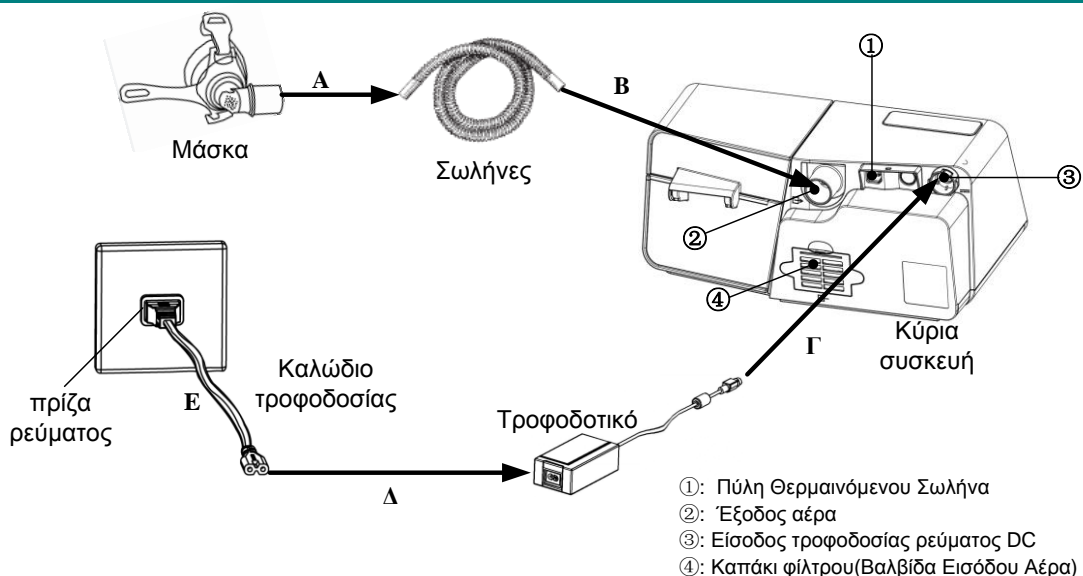

A. Τοποθετήστε το ένα άκρο του σωλήνα στη συνδεδεμένη μάσκα.


B. Συνδέστε το άλλο άκρο του σωλήνα στην έξοδο αέρα της συσκευής, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Συνδέστε το θερμαινόμενο σωλήνα στην έξοδο αέρα της συσκευής και στη συνέχεια, τοποθετήστε το βύσμα τροφοδοσίας στη θύρα στο πίσω μέρος της συσκευής.


Γ. Συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος με την είσοδο τροφοδοσίας ρεύματος DC της κύριας συσκευής.


Δ. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος με το τροφοδοτικό.


E. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.


## 3. Προσαρμογή ρυθμίσεων συσκευής

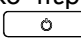A. Συνδέστε σωστά το καλώδιο τροφοδοσίας και τον μετασχηματιστή τροφοδοσίας. Στην οθόνη εμφανίζεται το αρχικό περιβάλλον που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Πιέστε το πλήκτρο Έναρξη / Διακοπή  και η συσκευή θα αρχίσει να παρέχει αέρα. Η οθόνη εμφανίζει την Κύρια διασύνδεση όπως φαίνεται στη μεσαία εικόνα (Ισχύει για μοντέλα G3 B20A, G3 B25S, G3 B25A) ή όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα (Ισχύει για μοντέλα G3 B25VT, G3 B30VT, G3 B30SV, G3 LAB)

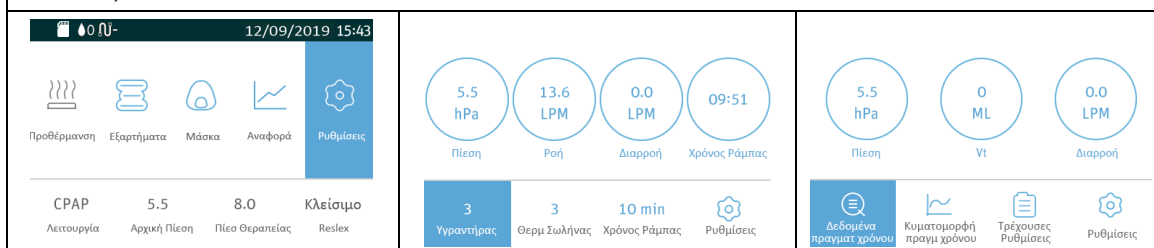

Β. Γυρίστε τον **Επιλογέα**  για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αρχική διεπαφή ρύθμισης του μενού ασθενούς, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η επιλογή **Θερμαινόμενος Σωλήνας** μπορεί να ρυθμιστεί μόνο όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στον θερμαινόμενο σωλήνα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

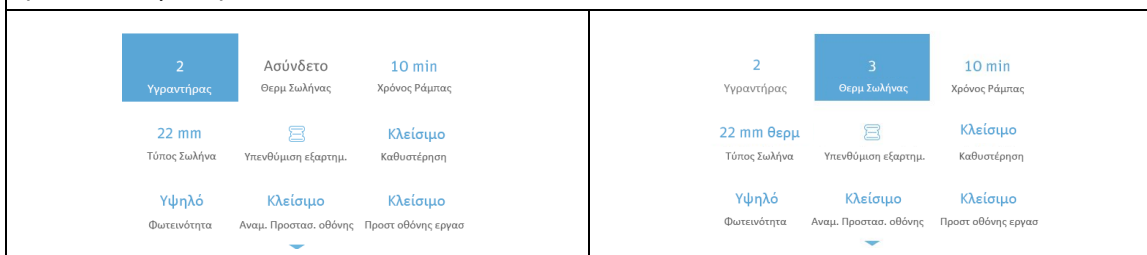

Γ. Πιέστε τον **Επιλογέα**  για να έχετε πρόσβαση στο περιβάλλον εγκατάστασης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.






Δ. Γυρίστε τον **Επιλογέα**  για να ρυθμίσετε μια επιλογή.



Ε. Πιέστε τον **Επιλογέα**  για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση που κάνατε στην επιλογή.



ΣΤ. Ο κέρσορας αλλάζει ανάμεσα στις επιλογές, καθώς περιστρέφετε τον **Επιλογέα** . Ανατρέξτε στα βήματα Γ-Ε για να ρυθμίσετε άλλες επιλογές. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχικής σελίδας**  για έξοδο από το περιβάλλον εγκατάστασης.

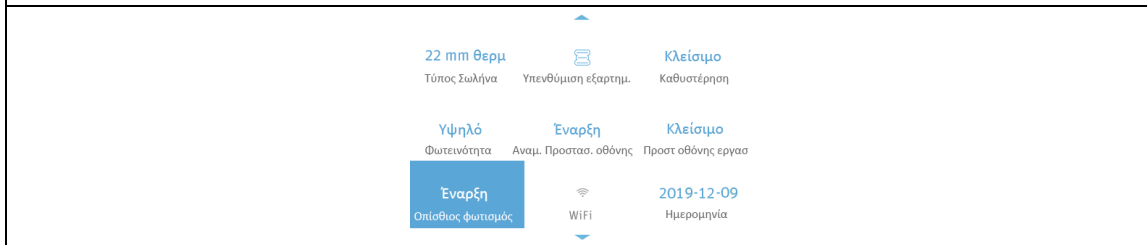

#### 4. Έναρξη θεραπείας

Αφού ολοκληρώσετε την προσαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής και επιστρέψετε στο αρχικό περιβάλλον, πιέστε το πλήκτρο **Έναρξης / Τερματισμού**  για να ξεκινήσετε τη θεραπεία.