

ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΚΑΤΑΚΛΙΣΗΣ TAURUS IV

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η αντλία εναλλαγής πίεσης Taurus IV και το στρώμα αποσκοπούν στη μείωση της συχνότητας εμφάνισης των κατακλίσεων, βελτιστοποιώντας παράλληλα την άνεση του ασθενούς. Επίσης παρέχουν τα εξής:

- ✚ Ατομικές ρυθμίσεις κατ' οίκον νοσηλείας και μακροχρόνια φροντίδα.
- ✚ Διαχείριση πόνου όπως έχει συνταγογραφηθεί από τον ιατρό.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Αντλία

Παρακάτω περιγράφονται οι λειτουργίες της αντλίας Taurus IV. Απευθυνθείτε στο σχέδιο από κάτω.

- ✚ Διακόπτης Ισχύος(1)
 - Ο διακόπτης βρίσκεται στο δεξί μέρος της αντλίας.
 - Γυρίστε στην θέση ON/OFF τον διακόπτη, η αντλία θα εκκινήσει/σταματήσει την λειτουργία της.
- ✚ Κουμπί ρύθμισης πίεσης(2)
 - Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης για να ορίσετε μία επιθυμητή τιμή πίεσης.
- ✚ Ένδειξη κανονικής πίεσης - Normal Pressure(3)
 - Μία ενδεικτική λυχνία (πράσινη) δηλώνει ότι η πίεση έχει φτάσει το προκαθορισμένο επίπεδο.
- ✚ Ένδειξη χαμηλής πίεσης - Low Pressure(4)
 - Μία ενδεικτική λυχνία (κίτρινη η κόκκινη) προειδοποιεί ότι το επίπεδο της πίεσης είναι χαμηλότερο από το προκαθορισμένο.
- ✚ Μηδενισμός Αλάρμ - Alarm Reset(5)
 - Ο ηχητικός/φωτεινός συναγερμός ενεργοποιείται όταν η πίεση είναι χαμηλή.
 - Για σίγαση του ηχητικού συναγερμού πιέστε το κουμπί "Alarm Reset". Η οπτική ένδειξη θα ανάψει.
 - Πιέστε ξανά το ίδιο κουμπί για να ενεργοποιήσετε πάλι τον συναγερμό.
- ✚ Στατική λειτουργία - Static Control(6)
 - Πιέστε το κουμπί "Static" για να μπει το στρώμα στην στατική λειτουργία

1. Διακόπτης ON/OFF
2. Ροδέλα μεταβολής πίεσης
3. Ένδειξη κανονικής Πίεσης
4. Ένδειξη χαμηλής Πίεσης
5. Μηδενισμός Alarm
6. Λειτουργία Static

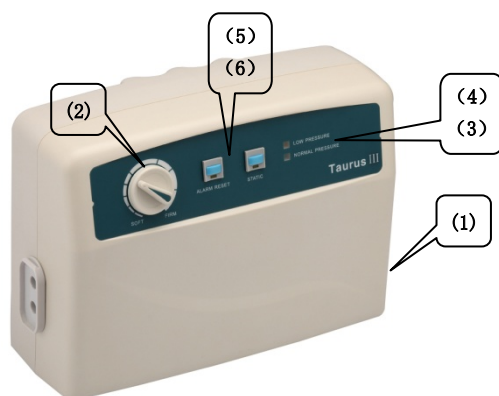

Στρώμα

Η αντλία Taurus IV συνοδεύεται από κυψελωτό στρώμα διαφόρων υλικών (Νάilon PVC, Νάilon TPU ή PU), παρέχεται προαιρετικά με την αντλία. Ανατρέξτε στις προδιαγραφές για λεπτομέρειες.

OPERATING INSTRUCTIONS

- ✚ Τοποθετήστε την αντλία σε οριζόντια θέση ή κρεμάστε την από τους γάντζους
- ✚ Ανοίξτε το στρώμα στο κρεβάτι. Ασφαλίστε το με τα άκρα του ή τις δέστρες. Οι σωληνώσεις του αέρα πρέπει να είναι στο κάτω μέρος του κρεβατιού.
- ✚ Συνδέστε τα σωληνάκια του αέρα στο στρώμα και την αντλία, σιγουρευτείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι τσακισμένες ή κουλουριασμένες. Αφήστε χώρο για να αναπτυχθεί το στρώμα.
- ✚ Ανάψτε την αντλία. Μετά από έναν σύντομο ήχο, η αντλία θα εκκινήσει την λειτουργία της.
- ✚ Η ένδειξη χαμηλής πίεσης (κίτρινη λυχνία) θα ανάψει καθώς το στρώμα φουσκώνει.
- ✚ Ο ηχητικός συναγερμός δεν ενεργοποιείται για τα πρώτα 40 λεπτά και θα ενεργοποιηθεί αν μετά από αυτό το διάστημα η πίεση παραμένει χαμηλή. Σε αυτή την περίπτωση πιέστε το "Reset Alarm" για να σιγήσει, θα ανάψει η λυχνία του.
- ✚ Κατά την διάρκεια της πρώτης χρήσης συνιστάται η "Static" λειτουργία για να μειωθεί ο χρόνος φουσκώματος.
- ✚ Μόλις η πίεση φτάσει το προκαθορισμένο της επίπεδο σε περίπου 30 λεπτά, η ένδειξη της κανονικής πίεσης θα ανάψει, και η ένδειξη της χαμηλής πίεσης θα σβήσει.
- ✚ Ρυθμίστε την ροδέλα της πίεσης σε ένα επιθυμητό επίπεδο πίεσης έτσι ώστε το στρώμα να είναι σταθερό.
- ✚ Πιέστε το κουμπί της στατικής λειτουργίας (Static) για να μπει το στρώμα στην στατική λειτουργία, θα ανάψει η ένδειξή του. Η λειτουργία θα εκκινήσει σε περίπου 6 λεπτά. Πιέστε ξανά το ίδιο κουμπί για να επιστρέψει σε λειτουργία εναλλαγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην στατική λειτουργία το στρώμα παρέχει στον ασθενή μια σταθερή επιφάνεια που τον διευκολύνει στην μεταφορά ή την επανατοποθέτηση. Επίσης αποτρέπει την ανατροπή του ασθενούς σε περίπτωση που αυτός είναι σε καθιστή θέση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

- ✚ Θερμοκρασία λειτουργίας: 50°F ~95°F (10°C ~35°C)

- ✚ Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5°F~122°F (-15°C~50°C)
- ✚ Υγρασία λειτουργίας: 20%~80% χωρίς συμπύκνωση
- ✚ Υγρασία αποθήκευσης: 10%~90% χωρίς συμπύκνωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΗΜΑΤΟΣ

- ✚ Μπορεί να πλυθεί με απολυμαντικό διάλυμα
- ✚ Μην βυθίζετε την αντλία σε νερό
- ✚ Μην ζεσταίνετε με ατμό σε κλίβανο
- ✚ Το στρώμα και το κάλυμμα να αερίζονται μέχρι να είναι πλήρως στεγνά

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Pump	Mattress
Μοντέλο: Taurus IV	Μοντέλο: EFFECT 8200 cell-on-cell
Ηλεκτρική Ισχύς: 220V/50Hz, 1A	Μέγεθος: 203cm(L) x 90cm(W) x 20cm(H)
Εξοδος αέρα: 8 liter/min.	Υλικό Καλύμματος: Nylon/PU with zipper
Εύρος πίεσης: 30mmHg–60mmHg (± 10)	Κυψέλες: Nylon/PVC (8” κυψελωτή κατασκευή with 5” εναλλασσόμενο άνω επίπεδο and 3” στατικό κάτω επίπεδο)
Χρόνος Κύκλου: 12 min.	Βάση: Nylon/PVC
Static Mode (Στατική Λειτουργία)	20 κυψέλες αέρα
Alarm Reset Mode (Μηδενισμός αλάρμ)	Βαλβίδα CPR για έκτακτη ανάγκη
Με ένδειξη για κανονική και χαμηλή πίεση	Λειτουργία μαξιλαριού
Μέγεθος: 28cm(L) x 20cm(W) x 10cm(H)	Γρήγορη απασφάλιση
Βάρος: 2.2 kg	

ΕΓΓΥΗΣΗ: 1 έτος για την αντλία