

Power Heat

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ XXL





ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ!

ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή, ειδικά τις οδηγίες ασφαλείας και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά.

Εάν δώσετε αυτήν τη συσκευή σε άλλο άτομο, είναι ζωτικής σημασίας να διαβιβάσετε και αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Μην τρυπάτε το προϊόν!



**Να μην χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά
(ηλικίας 0-3 ετών)!**



Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους!



Πλένεται στο χέρι!



Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικά!



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο!



Να μην σιδερώνεται!




Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Για τη συνεχή ασφάλειά σας και για να μειώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή ηλεκτροπληξίας, ακολουθήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω.
- Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό. Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους.
- Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία ή τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση. Πρέπει να κρυώσει εντελώς πριν από την αποθήκευση.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
- Μην βυθίζετε το προϊόν ή το καλώδιο δικτύου στο νερό. Μην τοποθετείτε το προϊόν κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν βεβαιωθείτε ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι ίδια με εκείνη που αναγράφεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών του προϊόντος.
- Μόνο η αφαίρεση από την πρίζα μπορεί να αποσυνδέσει πλήρως το προϊόν από το δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου δεν αγγίζει καμία καυτή επιφάνεια και ότι δεν προεξέχει από την άκρη του κρεβατιού σας.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από τζάκι και εστίες θερμότητας.
- Αποσυνδέστε την πρίζα μόνο από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ρεύματος όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Ελέγξτε για σημάδια φθοράς πριν καθαρίσετε οποιοδήποτε μέρος του προϊόντος.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα δικτύου. Αναζητήστε εξειδικευμένο τεχνικό για βοήθεια. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό ή από αντίστοιχα εξειδικευμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
- Προσοχή! Προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι από ακούσια επαναφορά του περιορισμού θερμοκρασίας, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή εναλλαγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή να συνδέεται σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από μια συσκευή.
- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο σε στεγνούς εσωτερικούς χώρους και ποτέ σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε σχολεία ή νοσοκομεία. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για οποιονδήποτε σκοπό που δεν αναφέρεται ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Τα άτομα με βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή του βηματοδότη πριν χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν, καθώς οι ηλεκτρονικές και μαγνητικές εκπομπές από αυτό το προϊόν μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του βηματοδότη σε ορισμένες περιπτώσεις.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

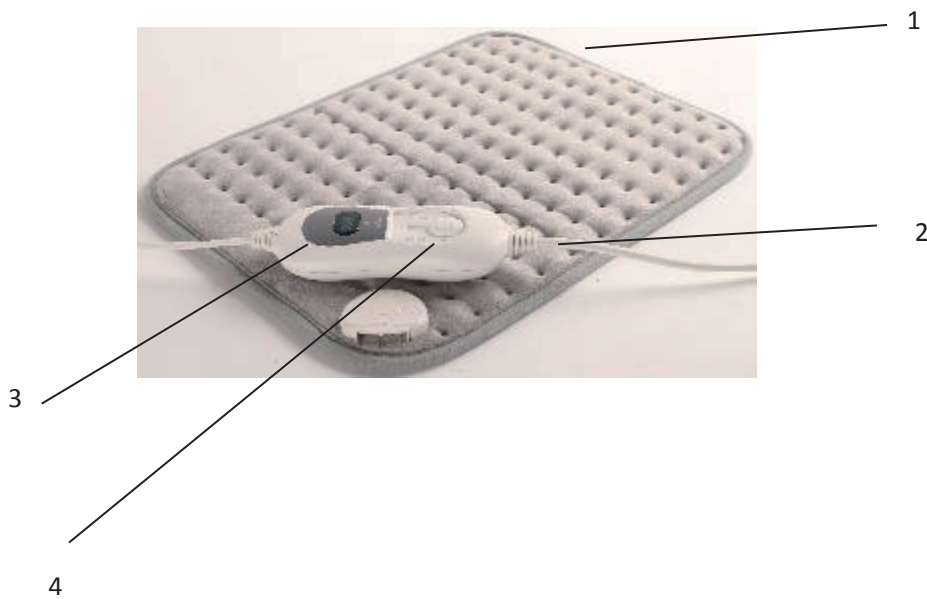

1. Θερμοφόρα
2. Καλώδιο δικτύου
3. Ένδειξη λειτουργίας
4. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-1-2-3

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επιθεωρήστε το προϊόν για πληρότητα και φθορές. Σε περίπτωση που τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι ελλιπή ή κατεστραμμένα, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το φως σε μια κατάλληλη πρίζα.
2. Ενεργοποιήστε το προϊόν.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση	Λειτουργία	ΣΗΜΕΙΩΣΗ
0	Απενεργοποιημένο	Η ρύθμιση 1 συνίσταται για συνεχή χρήση.
1	Ελάχιστη θέρμανση	Αυτή η θερμοφόρα δεν είναι σχεδιασμένη για χρήση σε νοσοκομεία ή για εμπορικούς σκοπούς.
2	Μεσαία θέρμανση	
3	Μέγιστη θέρμανση	Αυτή η θερμοφόρα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε μωρά, νήπια, άτομα με ευαισθησία στη θερμότητα, άτομα με ειδικές ανάγκες ή ζώα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η θερμοφόρα απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περίπου 90 λεπτά συνεχούς λειτουργίας. Απενεργοποιήστε τη θερμοφόρα (0) ή αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη θέρμανση μετά την αυτόματη απενεργοποίηση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αποσυνδέστε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και την υποδοχή του καλύμματος, έτσι ώστε το χειριστήριο να μην βραχεί στο πλύσιμο.
- Αφαιρέστε το καλώδιο και το χειριστήριο από την θερμοφόρα. Καθαρίστε το κάλυμμα σύμφωνα με τα σύμβολα φροντίδας ρούχων στην ετικέτα.
- Μην πλένετε στο πλυντήριο, μην περιστρέφετε ή στεγνώνετε, μην καθαρίζετε με χημικά, μην ξεπλένετε, μην πιέζετε ή σιδερώνετε το κάλυμμα.
- Αφαιρέστε τους μικρότερους λεκέδες με ένα πανί ή υγρό σφουγγάρι μαζί με λίγο απορρυπαντικό υγρό για ευαίσθητα υφάσματα, εάν είναι απαραίτητο.
- Χρησιμοποιήστε ξανά τη θερμοφόρα μόνο όταν το κάλυμμα στεγνώσει εντελώς.
- Συνιστάται να πλένετε τη θερμοφόρα μόνο εάν είναι βρώμικη ή σκονισμένη. Αν πλένετε το προϊόν πολύ συχνά, μπορεί να φθαρεί γρήγορα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ονομαστική τάση: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Ονομαστική ισχύς εισόδου: 100 W

Υλικό: Πολύ απαλό πανί, χωρίς κάλυμμα

Μέγεθος: 40x50cm

Μοντέλο: SS02(40*50)

ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.



Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στις οδηγίες σημαίνει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται στο τέλος της ζωής του ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για ανακύκλωση στην ΕΕ

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Διανομή:

ALFACARE SA

Kalavriton 6, 26335, Patras, Greece

www.alfacare.gr