


# Power Heat

## Εγχειρίδιο Χρήσης

### Ηλεκτρική θερμοφόρα αυχένα



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

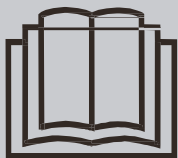

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ! ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ!

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, ειδικά τις οδηγίες ασφαλείας, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση. Εάν δώσετε αυτή τη συσκευή σε άλλο άτομο, είναι ζωτικής σημασίας να διαβιβάσετε επίσης αυτές τις οδηγίες χρήσης.



Να μη χρησιμοποιείται από πολύ μικρά παιδιά ηλικίας 0-3.



Μην τρυπάτε το προϊόν!



Μη χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο



Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα



Να μην σιδερώνεται



Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικά



Πλένεται στο χέρι

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



1. Θερμοφόρα
2. Καλώδιο δικτύου
3. Ένδειξη λειτουργίας
4. Ρύθμιση θερμοκρασίας 0-1-2-3

### ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επιθεωρήστε το προϊόν για πληρότητα και φθορές . Σε περίπτωση που τα περιεχόμενα της συσκευασίας είναι ελλιπή ή κατεστραμμένα, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστημα αγοράς του προϊόντος .

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ

Ονομαστική τάση: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Ονομαστική ισχύς εισόδου: 100 W

Μέγεθος: 60x62cm

Model No.: SS02C(60\*62)

## **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που ενέχονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας που αναγράφεται στην ετικέτα αξιολόγησης είναι συμβατή.
- Ελέγξτε προσεκτικά τη συσκευή πριν από κάθε χρήση για τυχόν φθορά ή ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε εάν παρατηρήσετε φθορά, ζημιά ή σημάδια ακατάλληλης χρήσης στη συσκευή, στο διακόπτη ή στα καλώδια.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από προμηθευτή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Μη χρησιμοποιείτε με μικρά παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες, που χρήζουν φροντίδας ή είναι ευαίσθητα σε θερμότητα.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή δεν επιτρέπεται να λειτουργεί ενώ διπλώνεται, τσαλακώνεται ή τοποθετείται γύρω από το στρώμα.
- Κατά τη χρήση, ο διακόπτης ελέγχου και το καλώδιο δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω ή κάτω από τη συσκευή ή να καλύπτονται με άλλο τρόπο.

- Δεν πρέπει να προσαρτώνται καρφίτσες ασφαλείας ή άλλα αιχμηρά ή αιχμηρά αντικείμενα στη συσκευή.
- Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε νοσοκομεία.
- Μην χειρίζεστε ποτέ τη συσκευή εάν έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε το από την πρίζα αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλον με υγρασία. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ξανά μόνο όταν είναι εντελώς στεγνό.
- Μην εκθέτετε ποτέ το διακόπτη ελέγχου ή το καλώδιο σε υγρασία οποιοδήποτε είδους.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από ζεστές επιφάνειες.
- Μην μεταφέρετε, τραβάτε ή περιστρέφετε ποτέ το καλώδιο από τη συσκευή και μην το αφήνετε να μπλεχτεί ή να πιαστεί.
- Μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας.
- Να γίνονται μόνο επισκευές από εξουσιοδοτημένο εξειδικευμένο αντιπρόσωπο ή κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο με το ειδικό χειριστήριο της.
- Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα.
- Καθαρίστε τη θερμοφόρα με πλύσιμο στο χέρι στους 30°C κατ' ανώτατο όριο (συνιστάται).
- Πλένετε τη θερμοφόρα στους 30°C (μέγιστο) σε χαμηλή περιστροφή καθώς η υψηλή ταχύτητα περιστροφής μπορεί να βλάψει τις εσωτερικές καλωδιώσεις.
- Κατά την αποθήκευση της συσκευής, αφήστε τη να κρυώσει πριν διπλωθεί. Κατά την αποθήκευση, μην τοποθετείτε αντικείμενα στη θερμοφόρα για να αποτρέψετε το δίπλωμα.

## **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ**

- Συνδέστε τη συσκευή με το αποσπώμενο χειριστήριο. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
- Η συσκευή θερμαίνεται γρηγορότερα όταν αρχικά ορίσετε το επίπεδο υψηλής θερμοκρασίας.
- Συνιστούμε να επιλέξετε το επίπεδο χαμηλής θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείτε τη θερμοφόρα για αρκετές ώρες.
- Τοποθετήστε τη θερμοφόρα στον αυχένα και κουμπώστε σωστά μετά την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας.

### **Ρυθμίσεις Θερμοκρασίας:**

Επίπεδο: 0=Off (χωρίς φωτεινή ένδειξη)

1=Χαμηλή θερμότητα (με φωτεινή ένδειξη)

2=Μέση θερμότητα (με φωτεινή ένδειξη)

3=Υψηλή θερμότητα (με φωτεινή ένδειξη)

### **Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης**

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 90 λεπτά. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, αλλάξτε πρώτα τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο επίπεδο "0" και στη συνέχεια, μετά από περίπου 5 - 10 λεπτά επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο θερμοκρασίας.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗ ΘΕΡΜΟΦΟΡΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.** Να αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε. ΜΗΝ το καλύψετε με οποιοδήποτε υλικό π.χ. πάπλωμα ή μαξιλάρι. Αποφύγετε την άσκηση πίεσης στο διακόπτη.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα πριν καθαρίσετε τη θερμοφόρα.
- Πριν το πλύσιμο, αποσυνδέστε τη από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.
- Αποσυνδέστε το χειριστήριο από τη θερμοφόρα χρησιμοποιώντας το βύσμα στην κάτω πλευρά.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Ποτέ μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το χειριστήριο σε νερό ή υγρό, θα προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά που δεν καλύπτεται από εγγύηση.

- Καθαρίστε τη θερμοφόρα με πλύσιμο στο χέρι στους 30°C κατ' ανώτατο όριο (συνιστάται).
- Μπορείτε επίσης να πλύνετε τη συσκευή σε πλυντήριο ρούχων με μέγιστη θερμοκρασία 30°C σε χαμηλή περιστροφή. Συνιστάται να τη πλένετε με το χέρι για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Για να στεγνώσει, τοποθετήστε τη θερμοφόρα σε μια πετσέτα που απορροφά την υγρασία. Όταν η συσκευή είναι εντελώς στεγνή, επανασυνδέστε το χειριστήριο. Η συσκευή λειτουργεί μόνο με το δικό της χειριστήριο.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι χρήστες υποχρεούνται να παραδώσουν τις ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι τοξικές ουσίες, σε δημοτικό ή εμπορικό σημείο συλλογής, ώστε να μπορούν να απορρίπτονται με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή τον προμηθευτή σας για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Το προϊόν διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

Διανομή: ALFACARE SA

Kalavriton 46, 26335, Patras, Greece

[www.alfacare.gr](http://www.alfacare.gr)