

Οδηγίες Χρήσης


AC-380 Περιστρεφόμενη καρέκλα μπάνιου

Μέγιστο Βάρος Χρήστη:

113 KG

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις παρακάτω οδηγίες πριν από την τοποθέτηση/χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

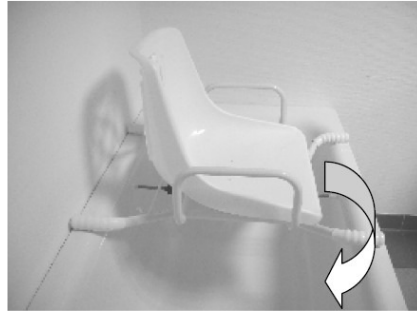

Εικόνα 1



Εικόνα 2

Ενδεδειγμένη Χρήση

Η περιστρεφόμενη καρέκλα μπάνιου είναι σχεδιασμένη για να επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να περιστρέφονται μέσα στη μπανιέρα και να μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους ενώ κάθονται σε αυτήν. Είναι κατάλληλη για τα περισσότερα είδη μπανιέρας, αλλά ακατάλληλη για γωνιακές μπανιέρες ή μπανιέρες με ανώμαλα τοιχώματα. Κατάλληλη για πλάτος μπανιέρας από 55 cm.

Χαρακτηριστικά

Πλάτος Καθίσματος: 44 cm
Μέγιστο Βάρος Χρήστη: 113 kg

Τοποθέτηση

1. Τοποθετήστε την καρέκλα στα τοιχώματα της μπανιέρας (Εικόνα 1) και στο επιθυμητό σημείο.
2. Ασφαλίστε την καρέκλα γυρίζοντας τους σφιγκτήρες μέχρι να τερματίσουν και στις δύο πλευρές των τοιχωμάτων. Η καρέκλα είναι τώρα έτοιμη για χρήση.

Χρήση

1. Τοποθετήστε το κάθισμα με φορά προς την εξωτερική πλευρά της μπανιέρας (Εικόνα 1) και ελέγξτε ότι είναι κλειδωμένο σε αυτή τη θέση. Μεταφέρετε το χρήστη στην καρέκλα. Ανασηκώστε τη λαβή κλειδώματος και περιστρέψτε το κάθισμα αργά προς το εσωτερικό της μπανιέρας (Εικόνα 2), προσέχοντας ιδιαίτερα όταν ανασηκώνετε τα πόδια του χρήστη.
2. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι κλειδωμένο και δεν περιστρέφεται πριν ξεκινήσετε το μπάνιο.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Μην υπερβαίνεται το μέγιστο βάρος χρήστη.
Επιθεωρείτε τακτικά το προϊόν για τυχόν ζημιές.

Οδηγίες Καθαρισμού

Κατασκευή από πλαστικό και ανοξείδωτο ατσάλι. Καθαρίζετε τακτικά με μαλακό σαπούνι και απολυμαντικό. Αποφύγετε τη χρήση γυαλιστικών.

Κατασκευή και διανομή:



Ιατρικά – Ορθοπεδικά
Καλαβρύτων 46, Πάτρα
www.alfacare.gr

