


Λαβή Τοίχου με βεντούζες

AC-390




Οδηγίες χρήσης-τοποθέτησης

1. Καθαρίστε τα πλακάκια του μπάνιου στο σημείο που επιθυμείτε να τοποθετήσετε τη λαβή.
2. Τοποθετήστε τη λαβή στην επιθυμητή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια των πλακακιών είναι στεγνή και οι βεντούζες εφάπτονται απόλυτα στην επιφάνεια. Οι βεντούζες δεν θα πρέπει να τοποθετούνται επάνω στους αρμούς ή λοιπές ενώσεις.

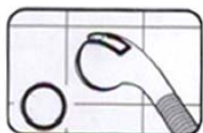

Σωστή Τοποθέτηση

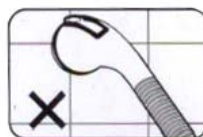

Λανθασμένη τοποθέτηση επάνω στους αρμούς

3. Τραβήξτε τα ειδικά κλιπς που βρίσκονται σε κάθε πλευρά της λαβής για να ενεργοποιηθεί η βεντούζα. Όταν η βεντούζα ενεργοποιηθεί θα δείτε τον πράσινο δείκτη. Σε αντίθετη περίπτωση ο δείκτης θα είναι κόκκινος. Η λαβή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν ο δείκτης είναι ΠΡΑΣΙΝΟΣ.



Θέση Ασφάλισης - Ασφαλές για χρήση

πράσινο = ασφαλές



κόκκινο = μη ασφαλές

Θέση Απασφάλισης

Οδηγίες απεγκατάστασης

1. Τραβήξτε και τα δύο κλιπς στη θέση απασφάλισης και απομακρύνετε τη βεντούζα.

Συντήρηση και φροντίδα

1. Ελέγχετε τη λαβή τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρή και χωρίς σκόνες ή λάδια.
2. Οι βεντούζες δεν θα πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο για μεγάλες χρονικές περιόδους, αφού αυτό μπορεί να επηρεάσει την ελαστικότητά τους.
3. Εάν οι βεντούζες έχουν σημάδια αλλοίωσης σταματήστε αμέσως τη χρήση του προϊόντος.



Η λαβή τοίχου με βεντούζες είναι σχεδιασμένη ως βοήθημα ισορροπίας.

****ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην στηρίζετε όλο το βάρος του χρήστη στις λαβές. Πάντα να ελέγχετε τις λαβές και τον δείκτη σωστής τοποθέτησης πριν από τη χρήση.

