


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ


ΚΑΓΚΕΛΑ ΜΟΝΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 68-117cm (ΣΕΤ) AC-840A
ΚΑΓΚΕΛΑ ΔΙΠΛΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ 117-185cm (ΣΕΤ) AC-840B

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ 1)

1. Αφαιρέστε το στρώμα από το κρεβάτι.
2. Τοποθετήστε το κρεβάτι σε επίπεδη θέση (Σε περίπτωση που το κρεβάτι διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης πλάτης και ποδιών)
3. Ρυθμίστε την κάθετη μπάρα, έτσι ώστε να εφαρμόζουν οι πλαϊνές δαγκάνες στις γωνίες του πλαισίου της κλίνης.
4. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία και για την άλλη κάθετη μπάρα.
5. Οι ειδικές υποδοχές για το κάγκελο (που βρίσκονται στα άκρα της κάθετης μπάρας), μπορούν να περιστραφούν από το κουμπί κλειδώματος, περιστρέφοντας τη ροδέλα δεξιά ή αριστερά.
6. Εισάγετε το κάγκελο στους σωλήνες υποδοχής της μπάρας. Τραβήξτε το κουμπί κλειδώματος για να ρυθμίσετε το ύψος του κάγκελου.

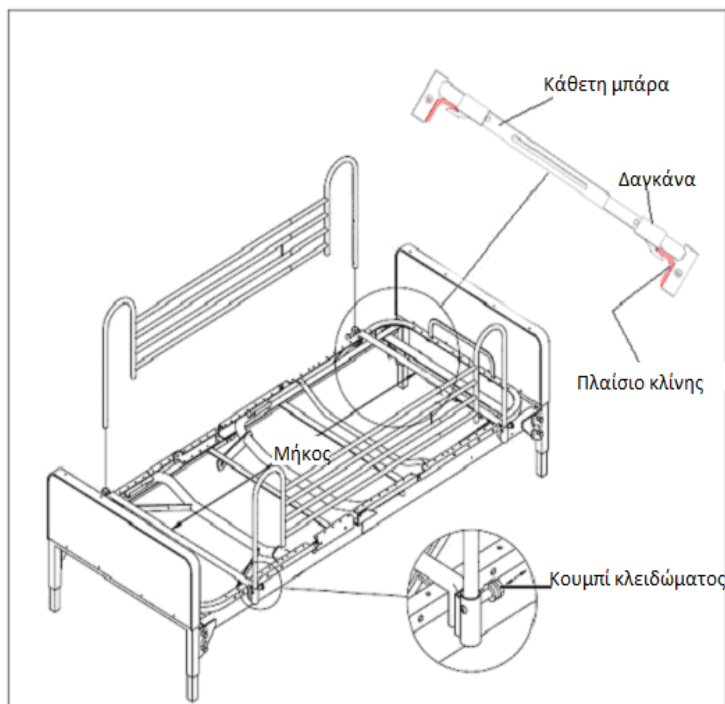

ΣΧΗΜΑ 1

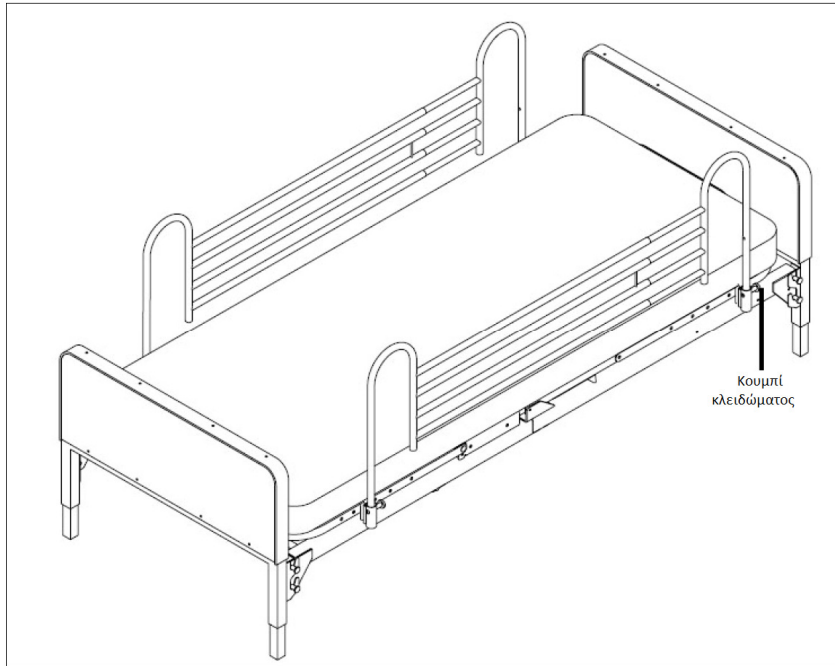

ΣΧΗΜΑ 2

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΣΧΗΜΑ 2)

1. Κρατήστε το κάγκελο με ασφάλεια και στη συνέχεια τραβήξτε το κουμπί κλειδώματος.
2. Ρυθμίστε το κάγκελο στο επιθυμητό ύψος και στη συνέχεια ελευθερώστε το κουμπί κλειδώματος μέχρι να ασφαλίσει στην κατάλληλη οπή.
3. Βεβαιωθείτε πριν από τη χρήση, ότι το πάνω και το κάτω μέρος των κάγκελων του κρεβατιού είναι ρυθμισμένα στο ίδιο ύψος.

ⓘ ΠΡΟΣΟΧΗ

Βεβαιωθείτε ότι τα κάγκελα έχουν στερεωθεί καλά πριν από τη χρήση στο κρεβάτι.

ⓘ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν τοποθετήσετε τα κάγκελα, βεβαιωθείτε ότι δεν δημιουργείται κενό μεταξύ του στρώματος ή του ξύλινου/μεταλλικού πλαισίου του κρεβατιού με το κάτω μέρος του κάγκελου. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού μέρος του σώματος του ασθενούς στο κενό που δημιουργείται.

ⓘ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε τα κάγκελα σαν λαβή/στήριγμα όταν μετακινείστε στο κρεβάτι. Ενδέχεται τα κάγκελα να υποστούν ζημιά από την υπερβολική πίεση.

Κατασκευάζεται για την:



Ιατρικά – Ορθοπαιδικά
Καλαβρύτων 46, Πάτρα
www.alfacare.gr



www.alfacare.gr