

# Οδηγίες Χρήσης

## AC-377 Λαβή τοίχου ανακλινόμενη

### Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις παρακάτω οδηγίες πριν από την τοποθέτηση/χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.



Μέγιστο Βάρος Χρήστη:

**100 KG**

### Ενδεδειγμένη Χρήση

Η ανακλινόμενη λαβή τοίχου είναι σχεδιασμένη για την ασφαλή στήριξη μέσα στο μπάνιο ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αναδιπλώνεται και ασφαλίζει σε όρθια θέση όταν δεν χρησιμοποιείται. Με ειδική θέση για το χαρτί υγιείας (προαιρετικά)

### Χαρακτηριστικά

Μήκος Λαβής: **72 cm**  
Μέγιστο Βάρος Χρήστη: **100 kg**

### Τοποθέτηση

1. Τοποθετήστε τη λαβή σε κατάλληλο τοίχο. Ενδέχεται να χρειαστούν μετατροπές για πιο σταθερή τοποθέτηση.
2. Ελέγξτε το υλικό κατασκευής του τοίχου (π.χ. τούβλα, μπετόν) για να επιλέξετε τα αντίστοιχα στερεωτικά υλικά και εξοπλισμό (βίδες, ούπα, τρυπάνι)
3. Βεβαιωθείτε ότι στο μέρος που θα τοποθετηθεί η λαβή θα μπορεί να αναδιπλώνεται ελεύθερα χωρίς να παρεμποδίζεται από έπιπλα ή άλλες κατασκευές.

### Προφυλάξεις Ασφαλείας

1. Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά και σταθερά στον τοίχο από ειδικευμένο άτομο.
2. Ελέγξτε προσεκτικά τον τοίχο που θα την τοποθετήσετε για τυχόν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες κλπ.
3. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος χρήσης.

### Οδηγίες Καθαρισμού

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι. Καθαρίζετε τακτικά με μαλακό σαπούνι και απολυμαντικό. Αποφύγετε τη χρήση γυαλιστικών.

Κατασκευή και διανομή:



Ιατρικά – Ορθοπαιδικά  
Καλαβρύτων 46, Πάτρα  
[www.alfacare.gr](http://www.alfacare.gr)

