

Οδηγίες Χρήσης

AC-386 Σανίδα Μπάνιου

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις παρακάτω οδηγίες πριν από την τοποθέτηση/χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.

Μέγιστο Βάρος Χρήστη:

113 KG



Οδηγίες εγκατάστασης:

Λαβή:

1. Τοποθετήστε τη μπλε λαβή στις οπές που υπάρχουν στο κάτω μέρος της σανίδας. Η λαβή θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα έξω. Στη συνέχεια βιδώστε τις μεγάλες πλαστικές βίδες που βρίσκονται στις οπές στα άκρα της λαβής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατσαβίδι ή ένα μικρό κέρμα.

Σανίδα:

2. Γυρίστε ανάποδα τη σανίδα και τοποθετήστε τους 4 πλαστικούς πείρους. Βεβαιωθείτε ότι οι πείροι είναι ελεύθεροι να μετακινούνται.

3. Σύρετε τους 4 πείρους προς το κέντρο, έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να χωρέσει η σανίδα κάτω από τα χείλη της μπανιέρας.

4. Τοποθετήστε τη σανίδα στη μπανιέρα με τη λαβή να βρίσκεται προς τη μεριά του τοίχου.

5. Σύρετε τους πλαστικούς πείρους μέχρι να εφαρμόσουν καλά στα εσωτερικά τοιχώματα της μπανιέρας και η σανίδα να μην κουνιέται καθόλου. Σφίξτε καλά τις 4 πλαστικές βίδες για να στερεωθούν καλά οι πείροι.

Χρήση του προϊόντος:

1. Καθίστε στη σανίδα με τα πόδια έξω από το μπάνιο.

2. Τοποθετήστε το ένα πόδι μέσα στη μπανιέρα. Η λαβή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιπλέον στήριξη.

3. Τοποθετήστε και το άλλο πόδι μέσα στη μπανιέρα.

4. Να κάθεστε στη μέση της μπανιέρας όταν κάνετε το μπάνιο σας.

5. Μετακινήστε το ένα πόδι έξω από την μπανιέρα.

6. Μετακινήστε και το άλλο πόδι έξω από την μπανιέρα και βάλτε και τα δύο σας πόδια σε μία μη-ολισθηρή επιφάνεια.

Προφυλάξεις Ασφαλείας

1. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο για μέγιστο βάρος χρήστη 113 KG.
2. Ελέγξτε προσεκτικά το μήκος της σανίδας σε σχέση με το πλάτος της μπανιέρας.
3. Η σανίδα δεν είναι κατάλληλη για στρογγυλές μπανιέρες.
4. Σε καμία περίπτωση μη στηρίξετε στη σανίδα.

Οδηγίες Καθαρισμού

Καθαρίζετε τακτικά με μαλακό σαπούνι και απολυμαντικό. Αποφύγετε τη χρήση γυαλιστικών.

Κατασκευή και διανομή:



Ιατρικά – Ορθοπεδικά
Καλαβρύτων 46, Πάτρα
www.alfacare.gr

