

- 1. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 10CM**
- 2. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΪΝΟΥΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 15CM**



## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

1. Σηκώστε το κάθισμα τουαλέτας που είναι ήδη εγκατεστημένο στη λεκάνη σας. Το ανυψωτικό θα πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας πάνω στη λεκάνη.
2. Τοποθετήστε το ανυψωτικό πάνω στη λεκάνη της τουαλέτας, έτσι ώστε το στενό μέρος του να βρίσκεται μπροστά και οι πλαϊνοί σφιγκτήρες πίσω.
3. Γυρίστε τους σφιγκτήρες μέχρι να σταθεροποιηθεί το ανυψωτικό στη λεκάνη. Βεβαιωθείτε ότι το χείλος στο μπροστινό μέρος του ανυψωτικού τουαλέτας είναι εξωτερικά της λεκάνης.
4. Ελέγξτε ότι το ανυψωτικό τουαλέτας είναι σταθερό και δεν μπορεί να μετακινηθεί.

### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

1. Όλα τα μέρη του ανυψωτικού τουαλέτας μπορούν να καθαριστούν με σαπούνι και ζεστό νερό.
2. Οι πλαϊνοί σφιγκτήρες μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό.
3. Το ανυψωτικό τουαλέτας θα πρέπει να ελέγχεται σε μηνιαία βάση για να διασφαλιστεί η σωστή του εφαρμογή.

### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

1. Το προϊόν είναι κατασκευασμένο για μέγιστο βάρος χρήστη 136 κιλά.
2. Η κατασκευάστρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που μπορεί να προκληθεί από ακατάλληλη εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή χρήση αυτού του προϊόντος.
3. Εάν κάποια μέρη του προϊόντος λείπουν ή έχουν καταστραφεί, επικοινωνήστε αμέσως με τον προμηθευτή σας. *ΜΗΝ* χρησιμοποιείτε άλλα ανταλλακτικά.
4. Μην χρησιμοποιείτε το ανυψωτικό τουαλέτας ως στήριγμα όταν σηκώνεστε ή κάθεστε στην τουαλέτα.
5. Βεβαιωθείτε ότι το ανυψωτικό τουαλέτας είναι καλά σταθεροποιημένο πριν από κάθε χρήση.