

Οδηγίες Χρήσης

AC-520 Κάθισμα Τουαλέτας Ανυψωτικό με Επένδυση Αφρολέξ

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις παρακάτω οδηγίες πριν από την συναρμολόγηση/χρήση. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες σε ασφαλές μέρος για μελλοντική χρήση.



Μέγιστο Βάρος Χρήστη:

115 KG

Ενδεδειγμένη Χρήση

Το κάθισμα τουαλέτας ανυψωτικό AC-520 είναι σχεδιασμένο για χρήση τουαλέτας σε άτομα με κινητικά προβλήματα. Έχει δυνατότητα ρύθμισης του ύψους από 47-57 cm και διαθέτει μαλακό και αναπαυτικό κάθισμα αφρολέξ με επένδυση από δερματίνη και πλαστικό δοχείο. Το άνω τμήμα του καθίσματος αποσπάται εύκολα για τη χρήση τουαλέτας.

Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις καθίσματος: **43(Π) X 45(Β) cm**
Ρύθμιση ύψους: **47-57 cm**
Μέγιστο Βάρος Χρήστη: **115 kg**

Συναρμολόγηση

1. Τοποθετήστε τη μεταλλική βάση του δοχείου πάνω στον σκελετό του καθίσματος.
2. Τοποθετήστε το πλαστικό δοχείο στην ειδική βάση.
3. Τοποθετήστε το κάθισμα πάνω στο σκελετό και σταθεροποιήστε.
4. Ρυθμίστε το ύψος στο επιθυμητό επίπεδο με τα ειδικά μπουτόν που υπάρχουν στα πόδια του καθίσματος

Προφυλάξεις Ασφαλείας

1. Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά και σταθερά.
2. Ρυθμίστε και τα 4 πόδια του καθίσματος στο ίδιο ύψος.
3. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος χρήσης.

Οδηγίες Καθαρισμού

Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό και δερματίνη.

Καθαρίζετε τακτικά με μαλακό σαπούνι και απολυμαντικό.

Αποφύγετε τη χρήση γυαλιστικών.

Κατασκευή και διανομή:



ALFACARE A.E.

Καλαβρύτων 46, Πάτρα

τηλ.: 2610323235

www.alfacare.gr