

Πίνακας Μεγεθών

Μέγεθος	Περιφέρεια μέσης
S	56-71cm
M	69-84cm
L	81-96cm
XL	94-109cm
XXL	107-122cm

Ζώνες

Μέγεθος Μέσης
Οδηγός Μέτρησης μέσης



Οδηγίες Πλύσιματος

- Αφαιρέστε όλες τις μπανέλες και σφραγίστε όλες τις δέστρες πριν το πλύσιμο.
- Πλύσιμο στο χέρι με ήπιο απορρυπαντικό σε κρύο νερό και κρέμασμα ώσπου να στεγνώσει.
- Εάν οι προσθήκες δεν μπορούν να μετακινηθούν, προτείνεται πλύσιμο στο χέρι. Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα, τα λευκαντικά και το σιδέρωμα.



Προσοχή

Εάν παρατηρηθούν αλλεργικά εξανθήματα στο δέρμα, παρακαλώ συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.



Οδηγίες Εφαρμογής


Ζώνη Οσφύος Πολλαπλών Παθήσεων 28 cm AC 1068



www.alfacare.gr


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ζώνη Οσφύος Πολλαπλών Παθήσεων

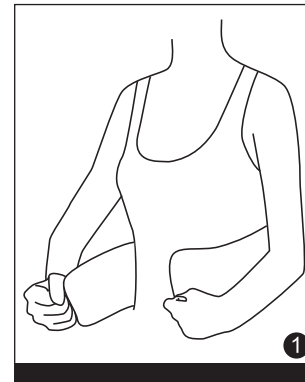

1. Τοποθετείστε το πλατύ στόμιο στο κάτω μέρος.

2. Εφαρμόστε στη μέση σας. Ελέγξτε εάν οι μπανέλες έχουν ευθυγραμμιστεί σωστά.

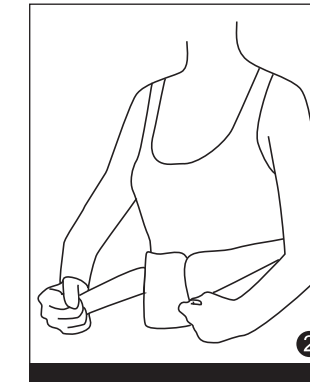

3. Ρυθμίστε την πίεση χρησιμοποιώντας τις πλάγιες δέστρες.

www.alfacare.gr

Tel: 2610 323235