

## Πίνακας Μεγεθών

Δεξιό ή Αριστερό

One Size

## Προσοχή

Να μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα alfacare σε περίπτωση που η χρήση τους προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις. Σε τέτοια περίπτωση παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας.



## Οδηγίες Εφαρμογής

Νάρθηκας Υποστήριξης  
Αντίχειρα Neoprene

AC-1085



## Οδηγίες Πλυσίματος


- Πλύσιμο σε κρύο νερό, στη ρύθμιση για ευαίσθητα ρούχα, μαλακό σαπούνι
- Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα ή το καθάρισμα στο στεγνωτήριο.
- Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού.
- Στέγνωμα σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος, απαγορεύεται η έκθεση του νάρθηκα σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.




www.alfacare.gr

## ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


### Νάρθηκας Αγκώνα Λειτουργικός Τηλεσκοπικός

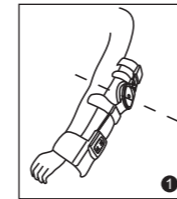


1. Τοποθετήστε το γωνιόμετρο στο ύψος του αγκώνα σας.
2. Ρυθμίστε το ύψος του νάρθηκα πιέζοντας ταυτόχρονα τα κουμπιά που βρίσκονται στις πλευρικές μπάρες.

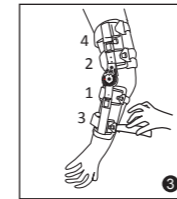

4. Αφήστε τα κουμπιά για να κλειδώσει στην επιθυμητή θέση.
5. Ασφαλίστε τις δέστρες ξεκινώντας από αυτές που βρίσκονται κοντά στον αγκώνα.

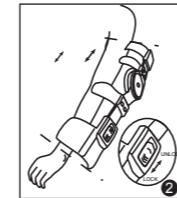


3. Το χαμηλότερο σημείο θα πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του καρπού και το υψηλότερο στο σημείο του βραχίονα που σας είναι πιο άνετο.

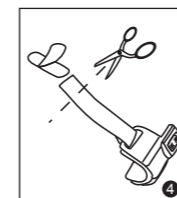


6. Αν χρειαστεί κόψτε τη δέστρα για ασφαλέστερο δέσιμο.
7. Οι πλευρικές μπάρες μπορούν να λυγίσουν ελαφρώς για να ταιριάξουν με την ανατομία του χεριού σας. adjustment completed.

#### Ρύθμιση του γωνιόμετρου:

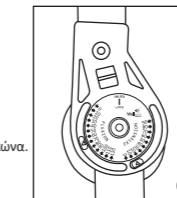

1. Πιέστε το κουμπί για να απασφαλίσει το γωνιόμετρο και ρυθμίστε στην επιθυμητή Κάμψη/Εκταση.

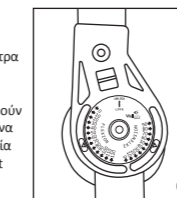


2. Επαναφέρετε το κουμπί στην αρχική του θέση για να ασφαλίσει.


#### Εφαρμογή της τιράντας:




1. Περάστε αρχικά τη μικρή δέστρα με το δακτύλιο στο μέρος του καρπού.

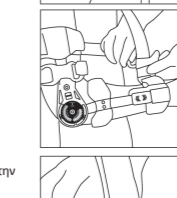

2. Τοποθετήστε την τιράντα και περάστε την γύρω από τον αντίθετο ώμο και πίσω από την πλάτη και κάτω από την τραυματισμένο χέρι.

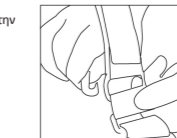

3. Περάστε το κλιπ της τιράντας στο δακτύλιο για να σταθεροποιήσετε.

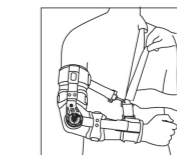

4. Ρυθμίστε την τιράντα για να σταθεροποιήσετε το χέρι σας στο επιθυμητό ύψος και τοποθετήστε το μαξιλάρκι στον λαιμό για περισσότερη άνεση.

www.alfacare.gr

Tel: 2610 323235